

## WS-2

Fonendoscopio profesional con pieza torácica con cabezal doble

ES Instrucciones de uso

**⚠ LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO**

### INTRODUCCIÓN

El fonendoscopio es el dispositivo más popular en una unidad médica. Es un instrumento de ayuda en la medición de la tensión arterial tanto en la clínica como en el Hogar.

### USO PREVISTO

Los fonendoscopios se utilizan para escuchar distintos ruidos cardiacos, pulmonares y de otros órganos.

Los fonendoscopios se utilizan junto con los kits de tensiómetro aneroides para medir la tensión arterial sistólica y diastólica.

### CARACTERÍSTICAS

WS-2 cuenta con una pieza torácica bilateral con diafragma y campana para la auscultación de los ruidos cardíacos de baja/alta frecuencia.

### PRECAUCIONES

- Este dispositivo podrá emplearse solo para la finalidad descrita en este manual. El fabricante no se hará responsable de los daños derivados de una aplicación incorrecta.
- El dispositivo deberá protegerse frente a los impactos.
- No se permite golpear la pieza torácica con fuerza. Podría dañar la membrana.
- No la dañe con objetos cortantes o afilados.
- No presione la membrana con la mano.
- No exponga el dispositivo a temperaturas excesivamente elevadas o bajas.
- Si la membrana está dañada o el tubo de látex gastado, cámbielos a tiempo. De lo contrario, podrían afectar al resultado de la prueba.
- Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, algunas piezas son suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.

### CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones. Consulte a su médico.

### ESTRUCTURA PRINCIPAL

El estetoscopio WS-2 consta de tubo binaural, campana y tubo en Y. La campana de dos lados tiene un diafragma y una campana.

### CÓMO UTILIZARLO

Procedimiento de funcionamiento:

1. Prepare el estetoscopio. Conecte el tubo binaural y la campana al tubo en Y.
2. Colóquese la pieza binauricular en los oídos.
3. Solo un lado de la pieza torácica está acústicamente activo cada vez. Golpee suavemente el diafragma con el dedo para que los sonidos lleguen hasta usted y pueda determinar si el dispositivo se encuentra en la posición correcta para el funcionamiento.
4. Si no escucha el sonido del golpeteo gire el cabezal 180 ° hasta que haga clic y se coloque en la posición adecuada mirando hacia el lado contrario.
5. A continuación, vuelva a dar un golpecito y oír su sonido, lo que significa que el dispositivo está correctamente colocado para el uso. Puede iniciar una auscultación.
6. Siga los mismos pasos cuando cambie de una pieza torácica a la otra.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda limpiar el fonendoscopio con una solución de alcohol al 75 % después de usarlo.

### GARANTÍA

La validez de la garantía es de 1 año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños provocados por un uso inadecuado ni los envases. Cuando se detecte un defecto de fábrica durante el período de validez de la garantía se reparará dicha unidad defectuosa y si la reparación es imposible se sustituirá por una nueva.

La fecha de fabricación se indica en un número de lote: día/mes/año.

Ⓢ El fabricante puede modificar las unidades parcial o completamente si es necesario, sin previo aviso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud del tubo en Y:	60 cm
Peso:	80 g (sin embalaje)
Condiciones de funcionamiento:	entre 5 ° y 40 °C, humedad: entre 15 % y 85 %
Condiciones de almacenamiento:	entre -20 ° y 70 °C, humedad: entre 10 % y 95 %

### INFORMACIÓN SOBRE LOS SÍMBOLOS



SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO



MARCADO CE



CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO



NOMBRE DEL FABRICANTE



PUEDA ELIMINARSE JUNTO CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



MODELO



NÚMERO DE LOTE

Última revisión 2020-W50

**B.Well Swiss AG**  
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Suiza  
www.bwell-swiss.ch