

# B.Well+

Caring for everyone

راهنمای دستورالعمل

## WK-160

DIGITAL BABY SCALE

ترازوی دیجیتالی اطفال

FA



B.WELL  
SWISS  
CONTROLLED

PRO

MED

TECHNO



## ترازوی دیجیتال اطفال مدل WK-160

### فهرست راهنما

1. مقدمه ..... 4
2. هدف مورد نظر ..... 4
3. موارد منع مصرف ..... 4
4. اقدامات احتیاطی ..... 4
5. شناسایی محصول ..... 5
6. دستور العمل راه اندازی دستگاه ..... 6
7. دستور العمل تمیز کردن دستگاه ..... 8
8. نگهداری از دستگاه ..... 8
9. مشخصات محصول ..... 8
10. موارد مصرف (بهره برداری از دستگاه) ..... 9
11. ضمانت ..... 9
12. اطلاعات نمادین ..... 10
13. آخرین بررسی ..... 10



## 1. مقدمه

مشتری عزیز

بابت خرید ترازوی دیجیتال اطفال B.Well به شما تبریک می گوئیم . برای انتخاب محصول ما از شما سپاسگزاریم .

این محصول توسط شرکت سوئیدی B.Well طراحی ، تایید و نظارت شده است . سیستم کنترل سوئیدی به کار رفته در این دستگاه ، کیفیت عالی ، استقامت و ایمنی همه محصولات B.Well را تضمین می کند .

ترازوی اطفال برای نشان دادن وزن کودک طراحی شده است . خواندن آخرین وزن ترازو ، کنترل وزن کودک را ممکن می سازد که طی مراحل اولیه رشد کودک بسیار ضروری می باشد .

شرکت B.Well تضمین می کند که این ترازو از مواد دارای کیفیت عالی ساخته شده است و استاندارد های ایمنی ملی و بین المللی رایج را بر آورده می سازد .

## 2. هدف مورد نظر

ترازوی دیجیتال اطفال برای اندازه گیری وزن کودک استفاده می شود .

## 3. موارد منع مصرف

هیچ مورد منع مصرفی مشخص نشده است .

## 4. اقدامات احتیاطی

به منظور راحتی و ایمنی کودک ، ترازو باید روی یک سطح صاف ، خشک و محکم قرار گیرد.

- ترازو را نزدیک منابع گرمایی ( رادیاتور ، اجاق گاز ، نور خورشید ) قرار ندهید .
- لطفاً کودک را در وسط کفه ترازو قرار دهید ، در غیر این صورت بر دقت و درستی وزن کنشی تاثیر می گذارد .
- اضافه بار ( سنگین تر از 20/5 کیلوگرم ) به شدت ممنوع میباشد .
- ترازو را تمیز نگاه داری کنید تا کار نرمال تضمین شود .
- به منظور جلوگیری از آسیب ، کودکان و افراد دارای معلولیت را با دستگاه تنها نگذارید.
- هنگام مشاهده LO ، باید فوراً باتری ها را تعویض کنید.
- هنگام نصب یا تعویض باتری ها ، به قطب آن ها دقت کنید.
- اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید ، باتری ها را از آن بیرون بیاورید.



- به منظور جلوگیری از خرابی زود هنگام ترازو را از ضربه و افتادن حفظ کنید.
- به منظور جلوگیری از برق گرفتگی ،ترازو را با دستان مرطوب لمس نکنید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه ، ترازو را خاموش کنید و باتری ها را بیرون بیاورید.
- طی تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده و ابزار ساینده استفاده نکنید چون می توانند به دستگاه آسیب برسانند.

## 5. شناسایی محصول

1. نمایشگر LCD
2. صفحه کار
3. بدنه اصلی



1. کلید روشن/ وزن خالص
2. کلید حالت (MODE)
3. کلید حافظه



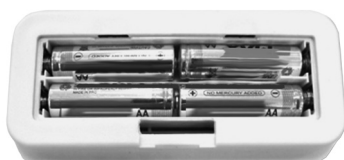
## 6. دستورالعمل ها برای راه اندازی دستگاه

### نصب باتری

1. ترازو را به دقت وارونه کنید و با فشار دادن چفت محفظه باتری، در پوش آن را باز کنید .



2. با مشاهده قطر باتری، آن ها را نصب کنید .



3. با فشار دادن چفت محفظه تا وقتی که صدای کلیک بدهد , در پوش آن را ببندید .



### توجه

علامت **LO** روی نمایشگر نشان می دهد که باتری ها ضعیف هستند . برای نشان دادن وزن دقیق باید باتری ها را تعویض کنید .

## کلید روشن / وزن خالص / خاموش

مطمئن شوید که ترازو روی یک سطح صاف ، محکم و خشک قرار دارد .  
پس از قرار دادن باتری ها ، کلید روشن / وزن خالص را فشار دهید تا ترازو روشن شود و علامت " 0.00 " مشخص شود .  
کودک را به آرامی روی کفه ترازو قرار دهید ، پس از چند ثانیه ،  
ثبت وزن روی صفحه ترازو چشمک خواهد زد .

ON/TARE



۱۳

### وزن خالص

از عملکرد وزن خالص استفاده کنید تا وزن پوشک کنار گذاشته شود. ( به صفر رساندن وزن پوشک)  
یک پوشک را روی ترازو قرار دهید و کلید روشن / وزن خالص را فشار دهید. نمایشگر و به 0 برمی گردد. کودک را روی پوشک قرار دهید و منتظر خواندن وزن شوید. وقتی که خواندن وزن روی نمایشگر چشمک زد ، وزن کنشی تمام می شود.

### توجه !

- به منظور جلوگیری از آسیب های جدی، طی وزن کنشی کودک را تنها نگذارید.
- از محدودیت وزن مجاز فراتر نروید (تا 20 کیلوگرم) در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی زود هنگام ترازو شود .

برای خاموش کردن ترازو، کلید روشن / وزن خالص را به مدت 3 ثانیه نگه دارید یا دستگاه به طور اتوماتیک، پس از 5 ثانیه خاموش خواهد شد.

## تغییر واحدهای وزنی

از کلید Mode (حالت) استفاده کنید تا واحدهای وزنی تغییر کنند (پوند یا کیلوگرم)

MODE

بسته به انتخاب شما، علامت Kg (کیلوگرم) یا Ib (پوند) در گوشه سمت راست بالای نمایشگر نشان داده می شود.

## ذخیره آخرین خواندن وزن در حافظه

به منظور ذخیره آخرین خواندن وزن ، کلید حافظه را فشار دهید. نشان دادن علامت Set روی نمایشگر بدین معنی است که ذخیره سازی موفقیت آمیز بوده است .

MEM



اگر می خواهید وزن ذخیره شده قبلی را مشاهده کنید ، در حالیکه ترازو در حالت "0.00" می باشد ، کلید حافظه را فشار دهید .

## 7. راهنمای تمیز کردن دستگاه

قبل از تمیز کردن ترازو ، باتری را خارج کنید . سپس بدنه دستگاه را با یک پارچه مرطوب و بدون استفاده از مواد پاک کننده تمیز کنید .

### توجه!

- از مواد پاک کننده و ابزارساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نکنید . چون می توانند به دستگاه آسیب برسانند .
- ترازو را زیر آب نشویید یا در آب فرو نبرید .

## 8. نگهداری از دستگاه

دستگاه را در دمای خیلی پایین یا بالا و رطوبت بالا نگهداری نکنید و آن را دور از نور مستقیم خورشید حفظ کنید .

دستگاه را در مکان سرد و خشک و دور از دسترس کودکان نگه دارید .  
دما و رطوبت نگهداری : 0 تا 60 درجه سانتی گراد ، <90%

## 9. مشخصات محصول

ابعاد	10×38/5×60/3 سانتی
متر، ترازو، باتری	2/6 کیلوگرم
منبع برق	6 ولت ( باتری های سایز 4AA )
حداکثر ظرفیت	20 کیلوگرم





20 گرم	حداقل ظرفیت
5 گرم	درجه بندی
کیلوگرم یا پوند	تغییر واحد
بین +5 تا -5 گرم	دقت
LO	قدرت ضعیف
Err	خطای تشخیص
ذخیره اختیاری و یاد آوری مقدار وزن	عملکرد حافظه
OLD	اضافه بار
اتوماتیک	خاموش شدن محیط فعالیت :
+40 درجه سانتی گراد ~+10	دما
درجه سانتی گراد	
< 80 %	رطوبت
	محیط نگهداری و حمل و نقل :
60 درجه سانتی گراد ~ 0 درجه سانتی گراد	دما
90%	رطوبت

## 10. موارد مصرف

این دستگاه باید مطابق با استاندارد های رایج، جدای از ضایعات خانگی استفاده شود .  
برای بهره برداری از دستگاه ، باید با سازمان های خاص تماس بگیرید تا مجوز بهره برداری صادر شود .





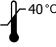
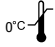
## 11. ضمانت

دوره ضمانت این دستگاه 12 ماه از تاریخ خرید آن می باشد .  
این ضمانت نامه ، آسیب های ناشی از مصرف نادرست ، آسیب ناشی از باطری ، پوشش محافظ و بسته بندی را پوشش نمی دهد .  
وقتی طی دوره ضمانت ، عیب و نقص تولیدی مشخص می شود ، دستگاه معیوب تعمیر می شود و در صورت عدم تعمیر ، با یک دستگاه دیگر تعویض می شود .  
تاریخ تولید به صورت یک شماره سریال می باشد ؛ دو رقم اول ، عدد ماه و 2 رقم بعدی ، عدد سال می باشد .  
ممکن است در صورت لزوم ، تولید کننده بخشی از دستگاه یا کل آن را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد .



## 12. اطلاعات نمادین

دوره ضمانت این دستگاه 12 ماه از تاریخ خرید آن می باشد .

مورد مراجعه	نماد	مورد مراجعه	نماد
نوع تجهیزات BF		قبل از مصرف، دستورالعمل ها را مطالعه کنید	
شماره کالا	<b>REF</b>	نام تولید کننده	
شماره سریال	<b>SN</b>	انهدام برای مجموعه مجزا	
محدودیت بر دمای استفاده 10°C		محدودیت بر دمای دخیره سازی 0°C	

## 13. آخرین بررسی

آخرین بررسی : 2017/1/20

رازان طب آپادانا

نماینده رسمی و انحصاری محصولات  
B.Well Swiss AG در ایران



**B.Well** 

Caring for everyone



**B.Well Swiss AG**

Bahnhofstrasse 24,  
9443 Widnau, Switzerland

[www.bwell-swiss.ch](http://www.bwell-swiss.ch)

IM\_WK-160\_FA\_0317