

**فهرست:**

|   |  |
|---|--|
| 2 | مقدمه.....                               |
| 2 | هدف مورد نظر.....                        |
| 2 | اقدامات احتیاطی.....                     |
| 2 | درجه حرارت نرمال چیست؟.....              |
| 2 | ویژگی های ترمومتر دیجیتالی.....          |
| 2 | دستور العمل برای تمیز کردن.....          |
| 2 | آماده سازی برای مصرف.....                |
| 2 | چگونگی به کار گیری ترمومتر زیر بغلی..... |
| 2 | چگونگی به کار گیری ترمومتر دهانی.....    |
| 2 | چگونگی به کار گیری ترمومتر مقعدی.....    |

**مقدمه**

مشتری عزیز، بابت خرید ترمومتر دیجیتالی Well به شما تبریک می گوییم.

برای انتخاب محصول ما از شما سپاس گزاریم.

شرکت Well تصمین می کند که این ترمومتر از مواد دارای کیفیت عالی ساخته شده است و استانداردهای ایمنی ملی و بین المللی رایج را بر آورده می سازد. قبلاً از استفاده از دستگاه، دستور العمل های مصرف و هشدار های ذکر شده را با دقت مطالعه نمایید. دستگاه را در یک مکان مناسب نگهداری کنید.

**هدف مورد نظر**

ترموومتر ها برای اندازه گیری درجه حرارت بدن از طریق روش دهانی، زیر بغلی و مقعدی به کار می روند.

**اقدامات احتیاطی**

- ممکن است ترمومتر فقط برای اندازه گیری دمای بدن به کار رود.
- حداقل زمان اندازه گیری تا وقتی که صدای بیب شنیده شود، باید بدون استثنای رعایت شود.
- مطمئن شوید که کودکان بدون نظارت شما از ترمومتر استفاده نمی کنند، برخی از بخش های دستگاه آنقدر کوچک هستند که ممکن است بلعیده شوند.
- ترمومتر را در برابر ضربه و افتادن محافظت کنید.
- از خم کردن نوک ترمومتر بیش از 45 درجه خودداری کنید.
- از دمای محیطی بالاتر از 60 درجه اجتناب کنید. هرگز ترمومتر را نجوشانید.
- برای تمیز کردن ترمومتر، فقط از مواد ضد عفونی کننده ذکر شده در بخش تمیز و ضد عفونی کردن، استفاده کنید.
- باطری ها و دستگاه های الکترونیکی باید مطابق با مقررات قابل قبول محلی منتهم شوند، نه مطابق با ضایعات خانگی.

**درجه حرارت نرمال چیست؟**

گرچه درجه حرارت نرمال پذیرفته شده معمولاً 36 درجه سانتی گراد می باشد، اما این دما می تواند از 35/2 تا 36/8 درجه سانتی گراد متغیر باشد و هنوز هم درجه حرارت نرمال تلقی می شود. تغییر نوسان در درجه حرارت می تواند مربوط به فعالیت هایی از قبیل ورزش، سیگار کشیدن، خوردن و نوشیدن باشد. دمای بدن شما در صبح پایین تر از بعد از ظهر می باشد. ممکن است تغییرات دیگر دمای بدن به علت محل خواندن درجه حرارت باشد: زیر بغلی (اندازه گیری زیر بغل)، دهانی (اندازه گیری در دهان) مقعدی (اندازه گیری از طریق مقعد) در حالیکه دمای زیر بغل، دستور العمل های ذکر شده را دنبال می کند، اما دما های دهانی معمولاً 0/5 درجه سانتی گراد بالاتر می باشد. در حالیکه دمای زیر بغل، دستور العمل های ذکر شده را دنبال می کند، اما دمای دهانی معمولاً 0/5 درجه سانتی گراد بالاتر می باشد. دمای مقعدی 1 درجه سانتی گراد بالاتر خواهد بود.

**ویژگی های ترمومتر دیجیتالی****WT-03****WT-04****WT-06****WT-07****دستور العمل ها برای تمیز کردن ترمومتر**

**روش اول:** ترمومتر را با یک پارچه نرم و الکل ایزو پروپیل رقیق شده با آب، تمیز کنید.

**روش دوم:** ترمومتر را با آب صابون گرم بشویید، سپس با یک پارچه مرطوب تمیز پاک کنید و بگذارید خشک شود.

**روش سوم:** ترمومتر را با یک دستمال مرطوب نرم و الکلی تمیز کنید.

**آماده سازی برای مصرف**

کلید روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه فعال شود.

دستگاه بیب بیب خواهد داد و همه ی اجزا را به مدت 2 ثانیه نشان خواهد داد.

**مدل WT-03، WT-07:** سپس ترمومتر یک دمای آزمایشی را نشان می دهد که 36/5 درجه سانتی گراد می باشد.

**مدل WT-04، WT-06:** آخرین دمای اندازه گیری شده، نشان داده می شود، سپس یک دمای آزمایشی که 37 درجه سانتی گراد می باشد به مدت 1 ثانیه نمایان می شود. اگر دمای آنات 32 < درجه سانتی گراد باشد، علامت L0 درجه سانتی گراد نشان داده می شود.

**مدل WT-03:** اگر دمای آنات  $\geq 44$  درجه سانتی گراد باشد، علامت Hi درجه سانتی گراد نشان داده می شود.

**مدل WT-07, WT-06, WT-04:** اگر دمای آنات  $\geq 43$  درجه سانتی گراد باشد، علامت Hi درجه سانتی گراد نشان داده می شود.

وقتی درجه سانتی گراد ظاهر می شود، ترمومتر آماده ی اندازه گیری دما می باشد.

**مدل WT-07, WT-03:** برای مشاهده آخرین دمای اندازه گیری شده، کلید روشن / خاموش را به مدت 2 ثانیه فشار دهید.

**چگونگی به کار بردن ترمومتر**

**چگونگی به کار بردن ترمومتر زیر بغلی** زیر بغل را با یک حolle خشک تمیز کنید و نوک

سوند را زیر بغل قرار دهید.

**توجه:** هنگام استفاده از ترمومتر زیر بغلی، ممکن است تعرق شدید باعث اندازه گیری نادرست شود. هنگام به کار بردن ترمومتر زیر بغلی، بازو را نزدیک بدن نگه دارید، به گونه ای که نوک سوند کاملاً توسط بازو بوشانده شود. دمای زیر بغل می تواند از 35/2 تا 36/8 درجه سانتی گراد متغیر باشد.

از دیدگاه پژوهشی، به کار بردن ترمومتر زیر بغلی، روش اندازه گیری بسیار دقیقی نمی باشد. به منظور بدست آوردن ارقام دقیق، باید نوک ترمومتر با بدن کاملاً تماس داشته باشد. وقتی نوک ترمومتر تماس نزدیکی با پوست ندارد، دستگاه زودتر بوق میزند و در نتیجه اندازه گیری پایین تر می باشد.

**چگونگی به کار بردن ترمومتر دهانی**

نوک سوند را زیر زبان و تا حد ممکن نزدیک به نقطه حرارتی قرار دهید. هنگام اندازه گیری دما، دهان را بسته نگه دارید. دمای دهان می تواند از 35/7 تا 37/3 درجه سانتی گراد متغیر باشد.

**توجه:** برخی فعالیت ها مثل نوشیدنی های کرم یا سرد، سیگار کشیدن و وزش کردن ممکن است دمای دهان را کاهش یا افزایش می دهند.

در نتیجه حتماً هنگامی که با ترمومتر دهانی دما را اندازه گیری می کنید، دهان را به مدت 1 دقیقه بسته نگه داشته و آرام باشید.

**چگونگی به کار بردن ترمومتر مقعدی**

برای بوشاندن نوک سوند از یک روغن محلول در آب استفاده کنید. نوک سوند را حدود 1 ثانیه در مقعد وارد کنید. دمای مقعدی می تواند از 36/2 تا 37 درجه سانتی گراد متغیر باشد.

# میانگین زمان اندازه گیری برای روش های مختلف اندازه گیری

| WT-07       | WT-06       | WT-04       | WT-03    |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 20-10 ثانیه | 20 ثانیه    | 60-50 دقیقه | زیر بغلی |
| 15-10 ثانیه | 15-10 ثانیه | 1 دقیقه     | دهانی    |
| 10-8 ثانیه  | 10-6 ثانیه  | 1 دقیقه     | مقعدی    |

به علت ویژگی های ذکر شده، ممکن است به کار بردن ترمومتر زیر بغلی، زمان بیشتری طول بکشد.

وقتی دما اندازه گیری می شود بوق می زند.

توجه وقتی دستگاه بوق می زند بدین معنی نیست که اندازه گیری تمام شده است. بلکه بدین معنی است که دمای بدنه اندازه گیری افزایش یافته است. پس از بوق زدن، دستگاه را به مدت 60-30 ثانیه نگه دارید.

معنای صدای بوق :

| WT-07 | WT-06 | WT-04 | WT-03 |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

کوتاه دما < 37/5 درجه دما < 37/8 درجه دما > 37/8 درجه دما > 37/5 درجه دما > 37 درجه

بلند به منظور طولانی تر کردن طول عمر باطری، پس از استفاده از دستگاه با فشار دادن کلید روشن / خاموش، آن را خاموش کنید.

دستگاه پس از 10 دقیقه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

**❶ هشدار :** طبق استانداردهای بهداشتی برای اندازه گیری مقعدی از همان دستگاه به کار رفته برای اندازه گیری زیر بغلی یا دهانی استفاده نکنید. دقیقاً قبل از اندازه گیری دما از نوشیدنی های سرد یا گرم، ورزش، سیگار کشیدن یا دوش گرفتن خودداری کنید.

## مراقبت های کلی از دستگاه

- کودکان باید تحت نظارت بزرگ سالان از ترمومتر استفاده کنند.
- طی اندازه گیری دما راه نروید، ندوید یا صحبت نکنید.
- قبل و بعد از هر اندازه گیری، دستگاه را تمیز کنید.
- وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در حالت حفاظتی نگذاری کنید.
- نوک ترمومتر را نجوبید.

- دستگاه را تحت نور مستقیم خورشید، در مکان مرطوب یا گرد و غبار نگذاری نکنید.
- از انداختن یا در معرض ضربه های شدید قرار دادن ترمومتر خودداری کنید.
- به جز برای تعویض باطری، دستگاه را از هم جدا نکنید.
- اگر نمایشگر "خطا" را نشان داد و اندازه گیری آغاز نشد، لطفاً با یک مرکز خدمات تماس بگیرید.

- ❷ هشدار :** دستگاه ممکن است آسیب بیند اگر:
- خارج از شرایط دما و رطوبت ذکر شده به کار رود یا نگهداری شود.
  - به زمین بیفتد یا آسیب مکانیکی داشته باشد.

## ❸ موارد منع مصرف : هیچ موردی مشخص نشده است.

### تعویض باطری

وقتی علامت در گوشه سمت راست پایین نمایشگر مشاهده شد، باید باطری ترمومتر دیجیتالی را تعویض کنید.

### برای تعویض باطری :

1. پیچ پوشش باطری را باز کنید.
2. در پوشش باطری را از دستگاه جدا کنید.
3. باطری را تعویض کنید.
4. در پوشش باطری را سر جایش بیندید.

**❹ هشدار :** باطری را دور از دسترس کودکان قرار دهید. باطری را در دمای بالا نگهداری نکنید.

### مشخصات دستگاه :

| WT-07   | WT-06   | WT-04   | WT-03   |
|---|---|---|---|
| 42/9-32/0 درجه<br>0/1 درجه سانتی<br>گراد  | 42/9-32/0 درجه<br>0/1 درجه سانتی<br>گراد  | 42/9-32/0 درجه<br>0/1 درجه سانتی<br>گراد  | 44/0-32/0 درجه<br>0/1 درجه سانتی<br>گراد  |
| دقت از 0/1 ±0/1 برای<br>دامنه اندازه گیری<br>42-35/5 درجه   | دقت از 0/1 ±0/1 برای<br>دامنه اندازه گیری<br>42-35/5 درجه   | دقت از 0/1 ±0/1 برای<br>دامنه اندازه گیری<br>42-35/5 درجه   | دقیقه 8 دقیقه 2 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه 2 دقیقه 2 دقیقه 8 دقیقه 8  |
| دقت از 0/2 ±0/2 درجه<br>برای دامنه اندازه<br>برای دامنه اندازه<br>گیری پایین تر<br>از 35/5 درجه و<br>بالاتر از 42 درجه<br>سانتیگراد | دقت از 0/2 ±0/2 درجه<br>برای دامنه اندازه<br>برای دامنه اندازه<br>گیری پایین تر<br>از 35/5 درجه و<br>بالاتر از 42 درجه<br>سانتیگراد | دقت از 0/2 ±0/2 درجه<br>برای دامنه اندازه<br>پایین تر از 35/5 درجه<br>گیری پایین تر<br>و بالاتر از 42 درجه<br>سانتیگراد | دقت از 0/2 ±0/2 درجه<br>برای دامنه اندازه<br>پایین تر از 35/5 درجه<br>گیری پایین تر<br>و بالاتر از 42 درجه<br>سانتیگراد |
| دقت از 0/1 ±0/1 برای<br>کار 1 سال<br>14/7x37x80/2mm<br>گرم  | LR41 /SR 41<br>حداقل 1 سال<br>148x22x20mm<br>گرم  | LR41 /SR 41<br>حداقل 1 سال<br>133x21x11mm<br>گرم  | ATMOSFERIK<br>اطمانتی<br>طول عمر باطری<br>اندازه دستگاه<br>وزن (با باطری<br>بدون کیف)                                   |

دما: 10 ~ 40 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی : ~ 30%

دما: 10 ~ 60 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی : ~ 25%

شرایط فعالیت

شرایط نگهداری

### دستگاه ترمومتر

1. ترمومتر

2. باطری

3. دستور العمل ها و کارت ضمانت

4. حالت حفاظتی

### بهره برداری از دستگاه

این دستگاه باید مطابق با استانداردهای رایج، جدای از ضایعات خانگی دور ریخته شود.

### برآوردن استانداردها

این دستگاه، شرایط EC بیانیه پیروی و سازگاری EC/42/93. برای تجهیزات پزشکی را برآورده می سازد.

**❶ هشدار :** می توانید دقت دستگاه را خودتان بررسی کنید. داخل یک ظرف (ml300-500) آب گرم 36 تا 41 درجه سانتی گراد ببریزید. دو یا چند ترمومتر از جمله ترمومتری که میخواهید آن را بررسی کنید و یک ترمومتر مرتع را در آن قرار دهید.

نوک سوند ها باید در یک سطح و حدود 2-3 سانت داخل آب باشد.

پس از 2-1 دقیقه، ارقام را مقایسه کنید. تفاوت ها آن ها نباید بیشتر یا کمتر از 0/1 درجه سانتی گراد باشد.

### ضمانت

دوره ضمانت این دستگاه 2 سال از تاریخ خرید می باشد.

این ضمانت نامه آسیب های ناشی از استفاده نادرست، آسیب ناشی از باطری، پوشش محافظ و بسته بندی را پوشش نمی دهد. وقتی نقص تولیدی طی دوره ضمانت مشخص شود، دستگاه معیوب تعمیر می شود یا در صورت عدم تعمیر، با یک دستگاه دیگر تعویض میشود.

تاریخ تولید روی دستگاه وجود دارد. LOT: عدد ماه و دو رقم آخر، عدد سال می باشد.

❷ ممکن است در صورت لزوم تولید کننده بخشنی یا کل دستگاه را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.

تاریخ فروش :

مهر فروشنده :

### اطلاعات نمادین

انهدام برای مجموعه مجرأ

نوع تجهیزات BF IP22 خاکسی: IP 22: (محافظ شده در برابر نفوذ اجسام حامد با ابعاد بیشتر از 12.5 mm. محافظ شده در برابر ورود فطرات آب در حال تشییع به صورت عمومی)

نام تولید کننده

CE 0044

آخرین بررسی :

24 / 1 / 2017

رازان طب آپادانا

نماینده رسمی و انحصاری محصولات

B.Well Swiss AG در ایران