



تعليمات التشغيل

1. مقدمة


شكرًا على شراء جهاز الاستنشاق، إنه جهاز مدمج مُصمَّم لتخفيف الحساسية، والبرد وبعض الاضطرابات التنفسية الأخرى. بالغاية والاستخدام المناسبين، سيمتلك سنوات عديدة من الخدمة الموثوقة.

نوصيك بقراءة كتيب التعليمات هذا بالكامل للتعرف على مميزات هذا المنتج. يجب دومًا تجنب أي استخدام لهذا المنتج خلاف الاستخدام المعين له.

2. دواعي الاستخدام

تستخدم البخاخات للعلاج الاستنشاقى للربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

3. تعريف المنتج

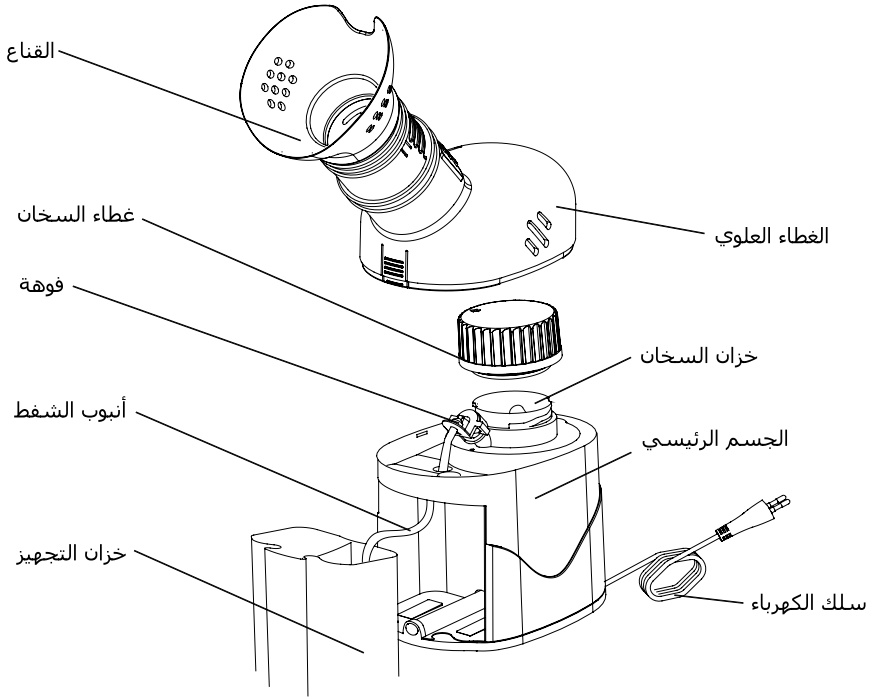

4. الاحتياطات

ⓘ ملحوظة:

- اقرأ جميع الإرشادات بعناية قبل الاستخدام
- الاحتياطات الأساسية التالية ضرورية عند استخدام منتج كهربائي:

تحذيرات المنتج:

- لتجنب الصدمة الكهربائية:
 - أبقِ الوحدة بعيدًا عن الماء
 - لا تقم سلك الطاقة أو الجهاز في الماء السائل أو تستخدمه أثناء الاستحمام
 - لا تمسك الوحدة إذا سقطت في الماء - وافصل الجهاز من الكهرباء فورًا.
- لا تشغّل الوحدة على الإطلاق إذا كان بها أي أجزاء تالفة (بما في ذلك سلك الكهرباء)، إذا كانت قد سقطت في الماء أو غمرت فيه. أرسلها على الفور إلى مركز الخدمة للفحص والإصلاح.
 - يحظر فتح الغطاء العلوي أثناء التشغيل إذ إنه يمكن أن يتسبب في إصابة بالغة.
 - افصل الوحدة من منفذ التيار الكهربائي قبل التنظيف، وعند الملء وبعد كل استخدام.
 - لا تستخدم الملحقات ما لم توصي بها الشركة المُصنعة.

⚠ تحذيرات التشغيل:

- صل هذا المنتج بمنفذ تيار الكهربائي يتناسب مع نموذجك.
- لا تُشغّل هذا المنتج دون رقابة.
- إذا كان خزان التجهيز فارغًا فلا تحاول تشغيل الوحدة لتجنب الحرق.
- غيّر الماء الموجود في خزانات التجهيز بعد كل استخدام.
- إذا حدث أي أمر غير معتاد، فأوقف الاستخدام على الفور حتى تخضع الوحدة للفحص والإصلاح.
- لا تضع عينيك على القناع عند استخراج البخار لتجنب الحرق بالبخار.
- إذا لم يكن هناك بخار يُستخرج من خزان السخان، أو ماء لا يمكن شفطه من خزان التجهيز فقم بإيقاف الوحدة وافصلها عن التيار الكهربائي. ثم استخدم بعناية دبوس الفوهة المُلتحق للإدخال في فوهات خزان السخان و/ أو خزان التجهيز لتسليكم حسب ما هو موضح في الشكل 1.
- لا تستخدم دبابيس أخرى فيما عدا الدبوس المُلتحق لتجنب إلحاق الضرر بالوحدة.
- لا تسد فتحات التهوية الموجودة على جانبي القناع
- افصل دومًا المنتج على الفور بعد الاستخدام.

تحذيرات التخزين:

- قم بتخزين جهاز الاستنشاق البخاري في مكان بارد بعيدًا عن الغبار وأشعة الشمس المباشرة. لا تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة والرطوبة العالية واحميهِ من السقوط والصدمات
- أبقِ الوحدة بعيدًا عن تناول الأطفال الصغار.
- أبقِ الوحدة دائمًا مفصولة عن الكهرباء عند عدم استخدامها.
- لتخزين الوحدة لمدة من الزمن ممتدة، افتح غطاء السخان لإبقاء هواء خزان السخان جافًا.

تحذيرات التنظيف:

- لا تقم الوحدة بالماء. فقد تلتف الوحدة.
- افصل الوحدة من منفذ التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- من الضروري قبل استخدام الجهاز لأول مرة وبعد كل علاج. لتنظيف جميع الملحقات ، كما هو موضح في القسم «6. التنظيف والصيانة»

5. تشغيل بخاخة البخار الخاصة بك

- ضع الوحدة على سطح صلب ومستوي.
- أزل الغطاء العلوي من الجسم الرئيسي.
- افتح غطاء السخان من خلال التدوير عكس عقارب الساعة.
- املاً ما يقارب 20 مل من المياه النقية في خزان السخان بالكوب الملحق. لا تجعل الماء يتجاوز الحد عند الملء وإلا فستُسَدّ فتحات تهوية خزان السخان.
- ⓘ ملحوظة!** لا تملأ خزان السخان بمياه مالحة.
- استبدل غطاء السخان. تأكد من وضعه بإحكام لتجنب تسريب البخار.
- املاً ما يقرب من 80 مل من الماء النقي أو المياه المالحة بالكوب الملحق في خزان التجهيز على النحو الموضح في الشكل 2.
- ⓘ ملحوظة!** إذا استُخدم ماء مالِح، فاتبع تعليمات طبيبك. لا تستخدم المياه المالحة بتركيز ملح أكثر من 7% إذ إنه قد يتسبب في الضرر لجسمك.
- استبدل الغطاء العلوي الموجود على الجسم الرئيسي. تأكد من توصيل أنبوب الشفط بالفوهة وإدخاله في خزان التجهيز.
- ⓘ ملحوظة!** تجنب تني أنبوب الشفط لإتاحة التدفق السلس للماء في الفوهة.
- ضع القناع على الغطاء العلوي.
- وصِّل سلك الكهرباء بالقابس في منفذ كهرباء مناسب لنموذجك. تأكد من أن مفتاح الطاقة الموجود على سلك الكهرباء في وضع الإغلاق "OFF" قبل وضعه في القابس.
- اضغط على مفتاح الطاقة لبدء العلاج. سيُضاء المصباح الموجود في أسفل الوحدة.
- اضبط غطاء الشريحة للحصول على علاج مريح (انظر الشكل 3).
- حرك الغطاء لأسفل لتقليل درجة حرارة البخار. هذا الوضع أفضل للأطفال والأشخاص الذين يعانون من الغشاء المخاطي المتتهيج أو فرط الحساسية في الجهاز التنفسي. حرك الغطاء لأعلى لزيادة درجة حرارة البخار. سيكون الإجراء أكثر كثافة بهذه الطريقة
- بعد ما يقارب 7 دقائق عندما يصبح استخراج البخار أقل أو أضعف، أو ينتهي الماء الموجود في خزان التجهيز اضغط على مفتاح الطاقة لإغلاق الوحدة.
- ⚠ مهم!** أغلق الوحدة في غضون 3 دقائق لتجنب الحرق بالبخار وارتفاع درجة حرارة الوحدة.
- افصل الوحدة من منفذ التيار الكهربائي.

14. للاستخدام التالي، بُرجى الانتظار 10 دقائق لترك الوحدة تبرد.

6. التنظيف والصيانة:

ⓘ ملحوظة! أفضل الوحدة دومًا من منفذ التيار الكهربائي ولا تقم الوحدة بالماء على الإطلاق.

⚠ مهم! لا تفتح غطاء خزان السخان مباشرةً بعد الاستخدام، إذ يمكن أن يكون الغطاء ساخنًا للغاية. انتظر ما يقرب من 10 دقائق لتركه يبرد بالكامل.

تنظيف الأجزاء:

- أزل الغطاء العلوي.
- أزل خزان التجهيز واسكب الماء المتبقي في الصرف.
- افتح غطاء خزان السخان واسكب المياه المتبقية في خزان السخان.
- يجب تنظيف خزان التجهيز، والغطاء العلوي، والقناع، وخزان السخان وأنبوب الشفط بمنظف لطيف أو مبيد للجراثيم متوفر تجاريًا. اغسل كل جزء جيدًا واتركه يجف تمامًا في الهواء.
- امسح خزان السخان بقطعة قماش ناعمة غير منسلة.

تنظيف الوحدة الرئيسية:

يجب تنظيف الوحدة الرئيسية بقطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف غير كاشط ومياه.

الصيانة:

إذا استُخدم الماء المالِح، فاستخدم مياهاً نقيه لإعادة تنشيط الوحدة لبيع دقائق لتنظيف الفوهة.

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا استمرت أي مشكلات بعد الفحوصات التالية، التي أجريتها فأعد الوحدة إلى أقرب مركز خدمة للفحص والإصلاح.

الحالة	نقاط الفحص	الإجراءات التصحيحية
المصباح لا يضيء	افحص سلك الكهرباء لتأكد مما إذا كان متصلًا جيدًا بمنفذ الكهرباء تحقق مما إذا كان مفتاح الطاقة في وضع التشغيل «ON»	أدخل سلك الكهرباء بإحكام اضغط على مفتاح الطاقة
لا يُخرج بخار	تحقق مما إذا كان المصباح مُضاء تحقق مما إذا لم يكن هناك ماء في خزان السخان أو خزان التجهيز تحقق مما إذا كان أنبوب الشفط منئيًا تحقق مما إذا كانت الفوهات مسدودة	أدخل سلك الكهرباء واضغط على مفتاح الطاقة املاً الماء اجعل الأنبوب مستقيمًا استخدم دبوس الفوهة الملحق لتسليكمها
تسريب مياه	تحقق مما إذا كان خزان التجهيز مملوءًا أكثر من اللازم تحقق مما إذا كانت الوحدة مائلة.	اسكب بعض الماء اجعل الوحدة مستوية
تسريب بخار	تحقق مما إذا كان غطاء خزان المدفأة مغلقًا بإحكام تحقق مما إذا كانت الفوهة مغلقة بإحكام	أغلق غطاء خزان السخان بإحكام أغلق الفوهة بإحكام

8. المواصفات

الطاقة:	230 فولت/ 50 هرتز
استهلاك الطاقة:	140-180 وات
سعة خزان السخان:	25 مل
سعة خزان التجهيز:	60 مل
الوقت المستغرق لغلي الماء (وقت الانتظار):	نحو 75 ثانية
وقت العلاج:	6= وات
فصل التيار آليًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة:	من خلال الصمام الكهربائي الحراري
صمامات الأمان:	الصمامات المزدوجة الموجودة على خزان السخان
الوزن:	560 جم.
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع):	260 × 90 × 235 مم

9. المعايير المطبقة













تم اختبار العينة المذكورة أعلاه من المعدات المذكورة أعلاه للحصول على علامة EC والتوجيه الأوروبي والمعايير التالية:

- توجيه الجهد المنخفض UE / 4102/53
- توجيه التوافق الكهرومغناطيسي UE / 4102/03

10. الضمان

فترة الضمان عامان من تاريخ شراء الجهاز. هذا الضمان لا يشمل أي أضرار تحدث بسبب الاستخدام غير المناسب، أو التعبئة والملحقات التي تُرَوّد مع الجهاز وتلك الأجزاء التي تتعرض للتلف الطبيعي بسبب الاستعمال. لا يعطي الضمان الأضرار الناجمة عن استخدام المحولات التي لم توصي بها شركة B.Well والجهد الزائد. وعند اكتشاف عيب في التصنيع خلال فترة الضمان، سيتم إصلاح الجهاز المُعطل أو، إذا كان لا يمكن إصلاحه، فسيتم استبداله بأخر. يجوز للشركة المُصنّعة تغيير الوحدات جزئيًا أو كليًا إذا لزم الأمر، دون إخطار مسبق. تاريخ التصنيع موجود على الجزء السفلي من الجهاز في الرقم التسلسلي: أول رقمين هما رقما الأسبوع؛ وثاني رقمين هما آخر أرقام من سنة التصنيع. تاريخ تصنيع قطع الغيار التي يمكن شراؤها منفصلة عن الجهاز مكتوب في رقم التشغيل: أول رقمين هما رقما الأسبوع؛ وثاني رقمين هما آخر أرقام للسنة.

11. معلومات الرموز

	اقرأ التعليمات قبل الاستخدام		رقم التشغيل
	التخلص من المجموعة المنفصلة		رقم السلعة
	جهاز من الفئة II		اسم الشركة المصنعة
	لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه		يُحفظ في مكان جاف
	علامة EC		ظروف التشغيل، درجة الحرارة
	الرقم التسلسلي		ظروف التخزين، درجة الحرارة

المراجعة الأخيرة W17-2022