

# PRO-118

УУРЫН АППАРАТ



MN Ашиглах заавар

## 1. УДИРТГАЛ


Уурын аппарат худалдаж авсан танд талархаж байна. Энэ авсаархан төхөөрөмж нь харшил, ханиад болон бусад амьсгалын замын өвчнүүдийн шинж тэмдгүүдийг хөнгөрүүлэхэд зориулагдсан. Зөв арчилж ашиглах юм бол энэ төхөөрөмж олон жилийн турш танд үйлчлэх болно.

Төхөөрөмжийн онцлогуудын тухай мэдэж авахын тулд энэ зааврыг анхааралтай үншихыг зөвлөж байна. Төхөөрөмжийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглана уу.

## 2. ЗОРИУЛАЛТ:

Астма, архаг бронхит болон бусад амьсгалын замын өвчнүүдийн углагын эмчилгээний үед шүршигч ашиглагддаг.

## 3. ЭДЛЭЛИЙН ТАНИХ ТЭМДЭГ

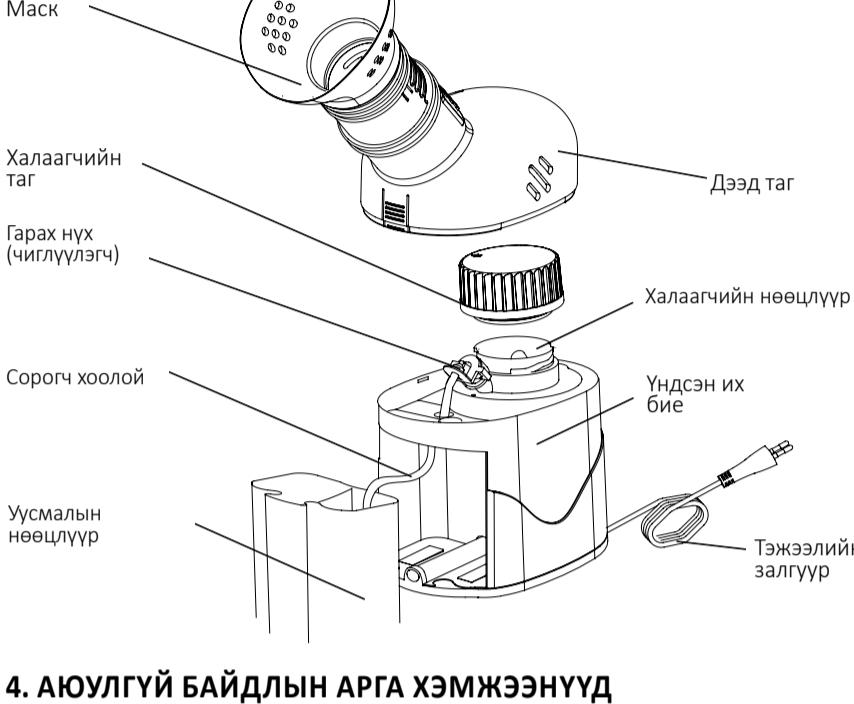

## 4. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

### ① ТАЙЛБАР:

1. Ашиглахын өмнө зааврыг анхааралтай үншина уу
2. Цахилгаан эдлэлийг ашиглах үед дараа аюулгүй байдлын үндсэн арга хэмжээнүүдийг баримтлах шаардлагатай:

### Аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд:


Цахилгаанд цохиулахаас зайлсхийхийн тулд:

- Төхөөрөмжид чийг оруулж болохгүй
- Төхөөрөмжийн залгуурыг шингэн буюу усанд дурж болохгүй. Баннд орж байхдаа ашиглажгүй байна уу.
- Усанд унасан төхөөрөмжийг гаргаж болохгүй – тэжээлийн залгуурыг шууд салгана.
- 3. Хэрвээ төхөөрөмжид аливаа гэмтэлтэй хэсэг илэрсэн (түүн дотор тэжээлийн залгуур), хэрвээ тэр унасан эсвэл усанд орсон бол төхөөрөмжийг ашиглаж болохгүй. Үзлэг болон засвар хийлгэхийн тулд шууд үйлчилгээний төвд түүнийг илгээнэ үү.
- 4. Төхөөрөмжийг ажиллаж байхад дээд тагыг нээж хориотой, учир нь энэ ноцтой гэмтэлд хүргэх болно.
- 5. Цэвэрлэгээ, дүүргэлт болон ашиглалт тутмын дараа төхөөрөмжийг сүлжээнээс салгана.
- 6. Үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн хошуунаас өөр хошуу ашиглаж болохгүй.

### △ Ашиглах үеийн аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд:

1. Таны загварт нийцсэн залгуурт төхөөрөмжийг залгана.
2. Асаалттай төхөөрөмжийг харахгүй үлдээж болохгүй.
3. Хэрвээ уусмылын нөөцлүүр хоосон байгаа бол түлэгдэхээс сэргийлж төхөөрөмжийг ашиглаж болохгүй.
4. Ашиглалт тутмын дараа уусмылын нөөцлүүрийн усыг солих хэрэгтэй.

5. Аливаа гэмтэл үүссэн тохиолдолд мэргэжилтэн төхөөрөмжид үзлэг хийж засварлахаас өмнө төхөөрөмжийг ашиглаж болохгүй.
6. Түлэгдэхээс сэргийлж уур үүсэх үед маскийг нүднэд тавьж болохгүй.

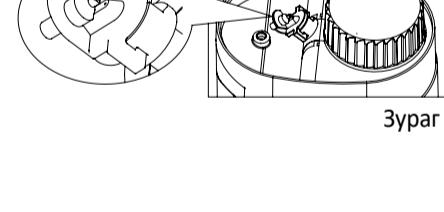

Зураг 1

7. Халаагчийн нөөцлүүрт уур үүсэхгүй эсвэл савнаас үс татагдахгүй байгаа бол төхөөрөмжийг унтраалга сүлжээнээс салгана уу. Дараа нь зураг 1 дээр харуулсаны дагуу хатгуурыг халаагчийн саб ба / эсвэл цэвэрлэгч уусмылын савны форсунк руу оруулана.
- Төхөөрөмжийн аливаа гэмтэлээс сэргийлэхийн тулд иж бурдэлд орсон хатгуураас өөр хатгуур ашиглаж болохгүй.
8. Маскны хоёр талд байгаа агааркуулалтын нүхийг хааж болохгүй
9. Багажийг ашигласны дараа үргэлж тогтоос салгана.

### Хадгалах нөхцөл:

1. Уурын аппаратыг тоос шороо, нарны шууд тусгалаас хол хуурай, сэрүүн газар хадгалана. Төхөөрөмжийг хэт халуун, хэт хүйтэн, хэт чийгшил, унах доргихоос хамгаална уу.
2. Багажийг хүхүдийн хүрэхгүй газар байршуулах хэрэгтэй.
3. Төхөөрөмжийг ашиглахгүй байгаа үед түүнийг үргэлж сүлжээнээс салгана.
4. Төхөөрөмжийг удаан хугацааны турш хадгалахын тулд халаагчийн нөөцлүүрт агаарыг хуурай байлгахын тулд халаагчийн тагыг нээнэ.

### Цэвэрлэх үеийн аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүд:

1. Төхөөрөмжийг усанд оруулж болохгүй. Энэ нь төхөөрөмжийг гэмтээж болно.
2. Төхөөрөмжийг цэвэрлэхийн өмнө түүнийг цахилгааны залгуураас салгана.
3. Төхөөрөмжийг анх удаа хэрэглэхээс өмнө болон эмчилгээ бүрийн дараа «6. ЦЭВЭРЛЭГЭЕ БА АРЧИЛГАА» хэсэгт заасны дагуу бүх дагалдах хэрэгслийг цэвэрлэх хэрэгтэй юм.

## 5. УТЛАГА ХИЙХ АЖИЛЛАГАА

1. Уурын аппаратыг тогтвортой тэгш гадаргуу дээр байрлуулна.
2. Үндсэн их биенээс дээд тагыг авна.
3. Халаагчийн дээд тагыг цагийн зүүний эсрэг тал руу эргүүлж нээнэ.
4. Иж бурдлийн аягыг ашиглах халаагчийн нөөцлүүрт ойролцоогоор 20 мл цэвэр ус хийнэ. Нөөцлүүрт хэт дүүргэж болохгүй, эсрэг тохиолдолд халаагчийн нөөцлүүрийн агааркуулалтын нүхнүүд хаагдана.

**① АНХААР!** Халаагчийн нөөцлүүрийг эрдэсийн ус, ханд г.м.-ээр дүүргэж болохгүй.

5. Халаагчийн тагыг байранд нь байрлуулна. Ур алдахгүй байхын тулд тэр нягт дарж байгааг шалгана уу.

6. Уусмылын нөөцлүүрт 80 мл-с хэтрэхгүй хэмжээний цэвэр эсвэл эрдэсийн ус, эмийн усан усмал (эмийн зөвлөсний дагуу), ханд, ургамлын ханд, арома тоосны усан уусмылыг аягаар хийнэ (зураг 2).

**② АНХААР!** Эрдэсийн ус ашиглах үед Таны эмийн зааврыг мөрдөнө үү. Уусмылын нөөцлүүрт давсны нягтрал нь 7%-с дээш хэмжээтэй эрдэсийн ус ашиглаж болохгүй, учир нь энэ Таны эрүүл мэндэд серөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай.

7. Дээд тагыг үндсэн их биенийн байранд нь байрлуулна. Сорох хоолой гарах нүхэнд холбогдох уусмылын нөөцлүүрт орсон байгаа шалгана уу.

**③ АНХААР!** Нүх руу усыг тэгш урсуулж оруулахын тулд сорох хоолой нугалахгүй байх хэрэгтэй.

8. Маскийг дээд таг дээр байрлуулна.

9. Таны загварт нийцсэн залгуурт тэжээлийн залгуурыг залгана.

Холбооны өмнө багажийн их биенийн тэжээлийн унтраалга «OFF» («ВыКЛ.») байрлалд



Зураг 2

байгаа эсэхийг шалгана уу.

10. Ажиллагааг эхлэхийн тулд тэжээлийн унтраалгыг дарна уу.

Уурын аппаратын доод хэсгийн гэрэл асна.

11. Уурын урсгалын хөдөлгөөн эрчим тохиуулгачийг ажиллагаа явуулаж шаардлагатай байрлалд тохиуулна (Зураг 3 харна уу). Уурын температурыг буруулахын тулд тагийг доош гүйлгэн нээнэ үү. Тагийг нээх нь хүхэд, салст цочромтой буюу амьсгалын замын хэт мэдрэгшилтэй хүмүүст илүү тохиromжтой. Уурын температурыг нэмэхийн тулд тагийг нь дээшлүүлнэ. Ингэснээр эмчилгээ илүү хүчтэй байх болно.

12. Ойролцоогоор 7 минутын дараа уурын хэмжээ багасаж уур гаралтад эрчим буурах үед, эсвэл уусмылын нөөцлүүрийн ус дусах үед уурын аппаратыг унтраалын тулд тэжээлийн унтраалгыг дарна. Халаагчийн нөөцлүүрийн ус дууссаны дараа багаж өөрөө унтарна.

**△ АНХААР!** Түлэгдэл болон уурын аппаратын хэт халалтаас сэргийлэхийн тулд уурын аппаратыг 3 минутын турш унтарсан байдалтай байлгана.

13. Уурын аппаратыг залгуураас салгана.

14. Дараагийн ашиглалтын өмнө уурын аппаратыг хөргөхийн тулд 10 минут хүлээнэ.

## 6. АРЧИЛГАА БА ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

**① ТАЙЛБАР!** Төхөөрөмжийг үргэлж цахилгаан залгуураас салгаж төхөөрөмжийг хэзээ ч усанд оруулж болохгүй.

**△ АНХААР!** Ашигласны дараа шүүд халаагчийн нөөцлүүрийн тагыг нээж болохгүй, учир нь таг маш халуун байж болно. Түүнийг бүрэн хөргөхийн тулд ойролцоогоор 10 минут хүлээнэ үү.

### Сэлбэгүүдийн цэвэрлэгээ

1. Дээд тагыг авна.
2. Усны нөөцлүүрийг аваад хаягдал усны нөөцлүүр болон уусмылын нөөцлүүрт үлдсэн усиг асана.
3. Халаагчийн нөөцлүүрийн тагыг нээгээд халаагчийн нөөцлүүрт үлдсэн усиг асана.
4. Халаагчийн нөөцлүүр, дээд таг, маск, халаагчийн таг болон сорох хоолойг зөвлөн угаах эсвэл ариутгах шингэн тусламжтайгаар цэвэрлэх хэрэгтэй. Сэлбэг бүрүйг нямбай усаар зайлж бүрэн хатах хэрэгтэй.
5. Халаагчийн нөөцлүүрийг зөвлөн илбэрэгүй даавуураа арчина.

### Үндсэн төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ

Үндсэн төхөөрөмжийг зөвлөн даавуу, зүлгүүргүй угаах хэрэгсэл болон усаар цэвэрлэх хэрэгтэй.

### Арчилгаа

Хэрвээ эрдэсийн ус ашиглалтад гарах нүхийг (чиглүүлэгч) цэвэрлэхийн тулд цэвэр үс ашиглаж хэдэн минутын турш уурын аппаратыг ажиллуулна.

## 7. БОЛОМЖИТ ЭВДРЭЛҮҮД

Дараах шалгалтуудыг хийсний дараа аливаа асуудал арилахгүй байгаа бол уурын аппаратыг үзлэгээ оруулж засвар хийлгэхийн тулд ойрён техникийн үйлчилгээний төвд дамжуулж өгнө.

Эвдрэл	Шалгах хэрэгтэй зүйл	Эвдрэл арилгах арга хэмжээ
Чийдэн асахгүй	Тэжээлийн утас залгуурт сайн холбогдсон байгаа эсэхийг шалгана уу Тэжээлийн унтраалга ON («ВКЛ.») байрлалд байгаа эсэхийг шалгана уу	Сулжээний утсыг найдвартай холбоно уу Тэжээлийн унтраалгыг дарна уу
Үр гарахгүй	Чийдэн асаж байгаа эсэхийг шалгана уу Халаагчийн нөөцлүүрт үс байгаа эсэхийг шалгана уу Сорох хоолыг нугарч хаагдан байгаа эсэхийг шалгана уу Гарах нүх (чиглүүлэгч) хаагдаагүй байгаа эсэхийг шалгана уу	Сулжээний утсыг оруулж тэжээлийн унтраалгыг дарна уу Ус хийнэ Хоолойг тэгшилнэ