

## WF-5000

Хүргэх шаардлаггүй хэт ягаан туяаны халууны шил

MN Хэрэглэх заавар

### 1. ДИРТИЛГЭЛ

- Хүрлэг хэмжих хэт ягаан туяаны WF-5000 халууны шилийг сонгосон танд талархал илэрхийлье. WF-5000 халууны шил нь дараах давуу талуудтай:
  - Нэгд гурван халууны шилийг агуулсан – хүний биеийн хэмийг хэмжих, орчны агаарын хэмийг хэмжих ба эд зүйлсийн гадаргуун хэмийг хэмжих.
  - Хүний биеийн хэмийн хэмжилтийн горимд өндөр хэмийн тухай дохио өгнө.
  - Санах ойд 10 үзүүлэлтийг харж болно.
  - Том шингэн болор дэлгэцтэй.
  - Хэмжилтийн мэдрэгчийн төвлөрлийн ЛЭД гэрлийн болон дүүн үзүүлэлтүүд.

### 2. ЗОРИУЛАЛТ

Эмнэлгийн цахилгаан хэт ягаан туяаны WF-5000 халууны шил нь бүх насны хүний биеийн хэмийг хүрэлгүй хэмжих зориулалттай.

### 3. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

- Энэхүү багажийг ашиглахын өмнө доор заасан бүх заалтыг мөрдөхийг хичээнгүйлэн хүсье. Аливаа эсрэг үйлдэл нь эрүүд мэнд эсвэл хэмжилтийн оновотой байдалд хор урвуулах магадлалтай.
  - Халууны шилийг задлах, засварлах болон хуульбарлаж болохгүй.
  - Хэмжилт хийх мэдрэгчийг ашигласны дараа үргэлж армич байхыг санаарай.
  - Хэмжилт хийх мэдрэгчид хуруугаар хүрч болохгүй.
  - Энэхүү багажийг өөрчилж болохгүй.
  - Биеийн хэмийг 3 удаа хэмжихийг зөвлөж байна. Хэрвэ үзүүлэлт ялгаатай байвал хамгийн өндөр заалтыг ашиглана.
  - Халууны шилийн хэт хэм, дэндүү өндөр чийгшил эсвэл нарны шууд тусгалд байлгаж болохгүй.
  - Багажийг унагахгүй, хүчтэй цохиж болохгүй.
  - Хэмжилт хийхийн өмнө өвчтөн болоод халууны шил нь ерөөний тогтмол хэмд 30-с доошгүй минутад байх ёстой.
  - Дасгал хийх, тамхи татах эсвэл агаарт байхнаас багадаа 30 минутын дараа биеийн хэмийг хэмжих хэрэгтэй.
  - Байгаль орчны аюулгүй байдлын үүднээс ашигласан батареийг үндэсний эсвэл орон нутгийн тусгайлан дагуу татгалд оруулна.
  - Халууны шилийг задлахыг хориглоно.
  - Халууны шилийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглана.
  - Багажийг унагахгүйн тулд ашиглаж байх үедээ сайн бариарай.
  - Хэмжилт хооронд 1 минутын зай аваарай. Богино хугацаанд дараалсан хэмжилтийг хийх үед бага хэмжээний алдаа гарах магадлалтай. Хэрвэ зай авах боломжгүй бол биеийн хэмийн заалтын дундаж тоог аваарай.
  - Хүний биеийн хэмд үнэмлэхүй хэм хэмжээ гэж байхгүй. Бие тань эрүүд байхад биеийн хэмээ хэмжээтэй. Энэхүү заалт нь таны стандарт байх ба таны бие сайнгүй үеийн хэмжилтийн үзүүлэлттэй харьцуулж байж болно.
- Ямар ч нөхцөлд биеийн хэмийн үзүүлэлт нь ЭВӨХӨН мэдээллийн чанартай юм. Эмчилгээний аливаа арга хэмжээг авахын өмнө өөрийн эмчтэй зөвлөлдөөрэй.**


### 4. ХОРИГЛОХ ЗААЛТ:

△ **Хориглох заалт:** Илрээгүй.

### 5. БАГАЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



### 6. ШИНГЭН БОЛОР ДЭЛГЭЦИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

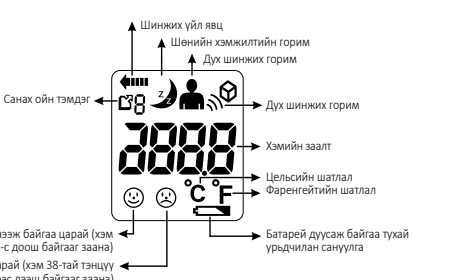

### 7. БАТАРЕЙН ТОХИРУУЛГА БА ТҮҮНИЙГ СОЛИХ

- Батареи дуусаж байгаа тухай урьдчилан сануулга: Дэлгэцэн дээр батареийн зураг гарч ирэхэд түүнийг ойрын хугацаанд солих шаардлага гарна. Дэлгэцэн дээр «Lo» гэсэн үзүүлэлт болон батареийн тэмдэгт гарч ирэхэд дараагийн заалтыг авахын өмнө түүнийг солих шаардлага гарна. Энэхүү багажийг тохирох дахин цэнэглэгдэх аккумуляторуудыг ашиглахын тулд.
- Батареи солих:
  - Батареийн тасалгааны тагийг болгоомжтой хойш хөдөлгөнө.
  - Хэрвэ багажийг удаан хугацааны туршид ашиглахгүй бол батареийн салгаж хадгалахыг зөвлөж байна.
  - Туйлшралыг харгалзан үзж шинэ батареийг тавина (AAA төрлийн 1,5 В шултлэг батареи хоёртой).
  - Батареийн тасалгааны тагийг буцааж байршуулна.

#### Ф ТАЙЛБАР:

- Бага насны хүүхдийн хүрэхгүй, халууны эх үзвэрээс хол газар батареийг хадгална.
- Хэрвэ багажийг удаан хугацааны туршид ашиглахгүй бол батареийг салгаж хадгалахыг зөвлөж байна.
- Багажийг удаан хугацаанд ажиллуулахгүй бол батареийг гаргаарай. Батареийг тухайн орон нутгийн болон бусад дүрмийн дагуу устгалд оруулна.

### 8. ФАРЕНГЕЙТ ЭСВЭЛ ЦЕЛЬСИЙН ШАТЛАХЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

- Тэжээлийн товчлуурыг дарж халууны шилийг асаана.
  - «Горим сонгох» болон «MEM» (Санах ойн) товчлууруудыг зэрэг 3 секундийн туршид дарна. Энэ нь Цельсийн эсвэл Фаренгейтийн шатлалын горимд шилжүүлнэ. Халууны шил дуут дохио өгөнгүүт багажийг ашиглахад бэлэн болно.
- Ф **ТАЙЛБАР:** Горимыг дахин шилжүүлэхийн тулд багаж нь дуут дохио өгөх хүлээх ба түүний дараа «Горим сонгох» болон «MEM» (Санах ойн) товчлууруудыг Цельсийн эсвэл Фаренгейтийн шатлалын горимд шилжих хүртэл дарна.

### 9. ХЭМЖИЛТИЙН ГОРИМУУДЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ

- Бага асаалттай байхад «Mode» товчлуурыг дарж хэмжилтийн өөр горимд шилжүүлнэ. Багаж нь «Хүн» ба «Эд зүйлс» гэсэн хоёр горимтой.
- Ф **ТАЙЛБАР:** «Mode» товчлуурыг дарах тоолонд дуут дохио дагалдах ба энэ нь шилжилт хийгдсэнийг баталгаажуулах болно.

### 10. ХҮНИЙ БИЕЙН ХЭМИЙН ХЭМЖИЛТ

Хүний биеийн хэмийг хэмжих зөвлөгөө. Хэмжилт хийхийн өмнө өвчтөн болон халууны шил нь хэмжилт хийх өрөөнд 30 минутаас багагүй хугацаанд байсан байх ёстой гэдгийг санаарай.

#### Ф ТАЙЛБАР:

- Хүний биеийн аливаа бусад хэсэг дээр хэмжилт хийх оролдлого нь оновчгүй үр дүнд хүргэх магадлалтай.
- Хэмжилт хийх үед өвчтөн нь хөдөлгөөнгүй байх ёстой.
- Хэт ягаан туяаны халууны шилээр хийсэн хэмжилтийн заалт нь амны хөндийгөөр хийсэн хэмжилттэй ижил байна. Энэхүү онцлогтой холбоотой аливаа асуудлаар өөрийн эмчдээ хандана уу.
- Нийр дүнд хэмжсэн хэмжилтийн заалт нь сэрүүн байхад хэмжсэн заалттай шууд харьцуулагдаж болохгүй. Нойрсож байх үед хүний биеийн хэм ихэнхдээ доогуур заалттай байдаг.
- Гаднаас орж ирэх, дасгал хийх эсвэл шүршүүрт/ваннинд орсноос хойш 30 минутын дотор биеийн хэмийг хэмжих болохгүй.

- Халууны шилийг асаахын тулд «Санах ойн товчлуур» дээр дарж нэг секундийн турш дарна. «Санах ойн товчлуур»-г тавихад багаж нь автомат туршилтыг гүйцэтгэж эхлэх ба дэлгэц дээр бүх элементүүд гарч ирсний дараа ажиллахад бэлэн гэдгийг заана.
  - Зурагт заасны дагуу багаж нь дүхэг шинжих горимд байгааг шалгаарай. Шаардлагатай тохиолдолд «Горим сонгох» товчлуур дээр нэг секундийн туршид дарж горимыг шилжүүлнэ. Хэмжилтийг дуут дохиогүй хийхийн тулд (жишээ нь, шөнө) «Шөнийн горим» сонгоорой.
  - Халууны шилийг эхлэх хэсгийг хүний дүх рүү чиглүүлнэ. Халууны шилийг хүний духнаас 3 см зайд барина.
  - «MEASURE» (Шинжих/хэмжилтийн товчлуур) товчлуурыг дараад тавих ба халууны шилийг хэмжилт хийх зөв зай олох хүртэл удаанаар дүх рүү болон эсрэг зүг чиглүүлэн хөдөлгөнө. Та богинохон дуут дохиог сонсох ба энэ нь хэмжилт хийгдсэн гэдгийг заана. Хэмжсэн хэмийг дэлгэц дээр гэрэлтүүлэн харуулна.
- Ф **ТАЙЛБАР:** Хэмжилтийн зөв зай олох хүртэл халууны шилийн дэлгэцэн дээр доор заасан тэмдгүүд гарч ирэх болно (20 секундний туршид). Түүний дараа халууны шил хүлээлтийн горимд шилжинэ.
- Багажийг 60 секундээс дээш хугацаанд ашиглахгүй бол багаж нь автоматаар унтрах ба батареийн ажиллах хугацааг уртасгадаг.

#### Ушигхыг харуулах:

- Духны хэмийг хэмжих горимд дэлгэцэн дээр инэжж байгаа царай гарах ба хүний биеийн хэм 38°C (100,4°F) - с доош байгааг харуулна. Хэрвэ биеийн хэм 38°C (100,4°F) - тай тэнцүү болон түүнээс дээш байвал дэлгэцэн дээр гунгитгай царайг та харах ба ЛЭД гэрлийн .

### 11. УСНЫ, АГААРЫН БОЛОН ЭД ЗҮЙЛСИЙН ГАДАРГУУН ХЭМИЙН ХЭМЖИЛТ

- Халууны шилийг асаахын тулд «Санах ойн товчлуур» дээр дарж нэг секундний турш дарна.
- «Санах ойн товчлуур»-г тавихад багаж нь автомат туршилтыг ажиллахад бэлэн гэдгийг заана.
- «Горим сонгох» товчлуур дээр нэг секундний туршид дарж зурагт заасны дагуу багажийг эд зүйлсийн шинжих горимд байгаа эсэхийг шалгана. Хэмжилтийг дуут дохиогүй хийхийн тулд (жишээ нь, шөнө) «Шөнийн горим» сонгоорой.
- Халууны шилийг урд хэсгийг орон зай дахь цэг, усны гадаргуу эсвэл эд зүйлс рүү чиглүүлнэ. Халууны шилийг объектоос ойролцоогоор 3 см зайд барина. «MEASURE» (Шинжих/хэмжилтийн товчлуур) товчлуурыг дараад тавина.
- Та богинохон дуут дохиог сонсох ба энэ нь хэмжилт хийгдсэн гэдгийг заана. Хэмжсэн хэмийг дэлгэц дээр гэрэлтүүлэн харуулна.

- Багажийг 60 секундээс дээш хугацаанд ашиглахгүй бол багаж нь автоматаар унтрах ба батареийн ажиллах хугацааг уртасгадаг.

### 12. САНАХ ОЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- Санах ойгоос дуудах  
Та сүүлийн 10 хэмжилтийн заалтыг санах ойгоос дуудаж өөрийн эмчдээ эсвэл эмнэлгийн мэргэшсэн ажилтанд үзүүлэх боломжтой.
- Багаж асаалттай үед «MEM» (Санах ойн товчлуур) товчлуур дээр богино хугацааны нэг удаагийн «M»
  - Санах ойд хадгалах «M» хэмжилт бүрт «M» дэлгэцэн дээр тэмдэг эсвэл хүний эсвэл эд зүйлсийн хэмийг хэмжсэн гэсэн тэмдэг гарч ирнэ.
  - Энэ л товчлуурыг дарснаар өмнөх хэмжилтийг дараалсан дүнгэлтийн хамт дэлгэцэн дээр дуудан гаргах ба түүний дараа «M» энэ мэтчилэн 9 хүртэл үргэлжилнэ.

#### Санах ойгоос устгах

- Санах ойгоос бүх заалтуудыг устгахын тулд багажийг асааж «MEM» (Санах ойн товчлуур) товчлуурыг 3 секундээс багагүй хугацааны туршид дарна.
  - Шингэн болор дэлгэцэн дээр тэмдэг «M» гарч ирэх ба санах ойн бүх үрүүд цэвэрлэгдсэн гэдгийг батлан багаж дуут дохио өгнө.
  - Санах ойн 10-н үрүүд дүүрсний дараа 11 дэх хэмжилт дээр автоматаар аливаа шинэ хэмжилт тэмдгийн «M» хамт бичигдэх ба Танаас аливаа үйлдлийг шаардахгүйгээр санах ойн хамгийн хуучин үүр автоматаар устгах болно.
- Ф **ТАЙЛБАР:** Хэмжилтийн хүний эсвэл эд зүйлсийн горимд авснаас үл хамааран бүх заалтууд устгах болно.

### 13. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЗААВАР

Хэмжилт хийх мэдрэгч ба Хэт ягаан туяан радар, Спирт шингэсэн хөвөнгөөр болгоомжтой цэвэрлэнэ. Лина цэвэрлэх зориулалттай ус ашиглаж болохгүй. Халууны шилийн гарч. Хуурай, зөвлөн давуугаар арчина. Багажийг цэвэрлэхэд ус ашиглаж болохгүй.

### 14. АЛДААГ ХАЙХ БА ЗАСВАРЛАХ

Багаж ажиллахгүй байгаа эсвэл хэмийг буруу хэмжих байгаа тохиолдолд доор заасны дагуу алдааны мэдээ дэлгэцэн дээр гарч ирнэ.

Дэлгэцэн дээрх дүрслэл	Шалтгаан	Лус
	Хэмжих хэм доор зааснаас дээш байна 1. Духны хэм хэмжих горимд халууны шил 42°C (107,6°F) 2. Эд зүйлсийн хэм хэмжих горимд халууны шил 100°C (212,0°F)	Халууны шилийг зөвхөн өгөгдсөн хэмийн хүрээнд ашиглана.
	Хэмжих хэм доор зааснаас доош байна 1. Духны хэм хэмжих горимд халууны шил 35°C (95,0°F) 2. Эд зүйлсийн хэм хэмжих горимд халууны шил 0°C (32,0°F)	Мэдрэгчийн үзүүрийг шаардлагатай тохиолдолд цэвэрлэнэ. Алдааны мэдээ дахин гарч ирсэн тохиолдолд үйлчилгээний төвд хандана уу.
	Орчны агаарын хэм нь 15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F хүртэл) хүрээнд байхгүй байна.	Халууны шилийг зөвхөн 15°C ~ 35°C хүртэлх агаарын хэмтэй өрөөнд ашиглаарай.

### 15. АШИГЛАЖ БҮЙ СТАНДАРТУУД

Энэхүү багаж нь Европын холбооны эрүүл мэндийн төхөөрөмж (MDD)-ийн 93/42/ЕЭС Зааврын заалтад нийцсэн. Багажийн төлөвлөлт болон/эсвэл үйлдвэрлэл дараах стандартуудыг ашигласан:

- ISO 9001-2: 56
- Эрүүл мэндийн цахилгаан төхөөрөмж Хэсэг 2-56. Хүний биеийн хэмийг хэмжих эрүүл мэндийн халууны шилийн үндсэн аюулгүй байдлын болон үндсэн ажлын шинж чанарт тавих хэсэг шаардлагууд
- IEC/EN 60601-1
- Эрүүл мэндийн цахилгаан төхөөрөмж Хэсэг 1. Аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлагууд
- IEC/EN 60601-2
- Эрүүл мэндийн цахилгаан төхөөрөмж Хэсэг 2. Туслах стандарт: Цахилгаан соронзон нийцэл – шаардлага ба туршилт

### 16. ТЕХНИК ӨГӨГДЛҮҮД

Хэм хэмжих хүрээ:	Хүний биеийн хэм: 35°C-42°C (95,0°F-107,6°F) Эд зүйлсийн хэм: 0°C-100°C (32,0°F-212,0°F)
Хэмжилтийн алдаа:	Хүний биеийн хэм: 35°C-42°C : ± 0,2°C (95,0°F-107,6°F) : ± 0,4°F) Эд зүйлсийн хэм: <40°C ± 2°C, ≥ 40°C ± 5%
Ашиглах нөхцөл:	95% хүртэл харьцангуй чийгшил (өтгөрөл үүсээгүй) - ийн үед 15°C-35°C (59°F-95°F) 95% хүртэл харьцангуй чийгшил (өтгөрөл үүсээгүй) - ийн үед -25°C-55°C (-13°F-131°F)
Хадгалах/тэвэрлэх нөхцөл:	0,1 °C ~3 см 1,5V AAA төрлийн батареи 2 ширхэг 141мм x 42мм x 55,5мм ~120r (батареийн хамт)
Дэлгэцний зөвшөөрөл:	
Хэмжилтийн хоорондын зай:	
Тэжээлийн эх үүсвэр:	
Хэмжээ:	
Жин:	

### 17. ИЖ БҮРДЭЛ

- Халууны шил
- Батареи: 1.5V AAA төрлийн батареи 2 ширхэг
- Зөвлөн гэр
- Ашиглах заавар

### 18. УСТГАЛ

Багажийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэмжээний дагуу устгах ба бусад ахуйн хягалдалтай хамт хаяж болохгүй. Багажийг устгахын тулд устгал хийх зөвшөөрөх бүхий тусгай байгууллагод хандана.

### 19. БАТАЛГАА

Баталгааны хугацаа нь багажийг худалдан авснаас хойш 2 жил байна. Буруу ашигласнаас үүссэн гэмтэл болон батареи, зөвлөн гэр ба баглаанд энэ баталгаа нь хамаарахгүй болно. Баталгаат хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл согог илэрсэн бол гэмтэлтэй халууны шилийг засварлах ба засварлах боломжийг тохиолдолд шинээр солино. Үйлдвэрлэсэн огноо багаж дээр серийн дугаарт заасан байна. Эхний хоёр тоо онгй заах ба сүүлийн хоёр тоо үйлдвэрлэсэн сарыг заана. Үйлдвэрлэлч нь шаардлагатай тохиолдолд урьдчилан мэдэгдэлгүй бүрэн эсвэл хэсэгчилсэн өөрчлөлтийг хийж болно.

### 20. ТЭМДГИЙН ТАЙЛБАР

ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ АШИГЛАХ ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ

ТООС БОЛОН УС ШҮРШИХИЭС ХАМГААЛАХ ТҮВИШИН: IP22 (12,5 мм-с илүү хэмжээтэй халуу биет онохоос хамгаалсан, БОСОО ДУСЛАХ УС ШҮРШИХИЭС ХАМГААЛСАН/ОМА КΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

ЗАГВАР

СЕРИЙН ДУГААР

ВГ ТӨРЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ

УСТАЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨ: ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЯЛГАН ЦУЛУУЛАХ

0044

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ НОРМЫН НИЙДЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ: 15-35 °C ХҮРТЭЛ ХЭМД

ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ: -25-55 °C ХҮРТЭЛ ХЭМД

**B.Well Swiss AG**  
Bahnhofstrasse 24, 9443 Vidnau, Switzerland  
www.bwell-swiss.ch



Caring for everyone

Сүүлийн хувилбар 2020-W44