


WC-150

ASPIRATOR DO NOSA

PL Instrukcja obsługi

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup aspiratora do nosa B.Well WC-150. Aspirator do nosa B.Well jest w stanie działać z dużą siłą, aby utrzymać nos czysty i drożny, w porównaniu z tradycyjnym aspiratorem gumowym. To urządzenie jest zaprojektowane z myślą o większym bezpieczeństwie, łatwiejszej obsłudze i ma kompaktową budowę – do użytku w domu i w podróży.

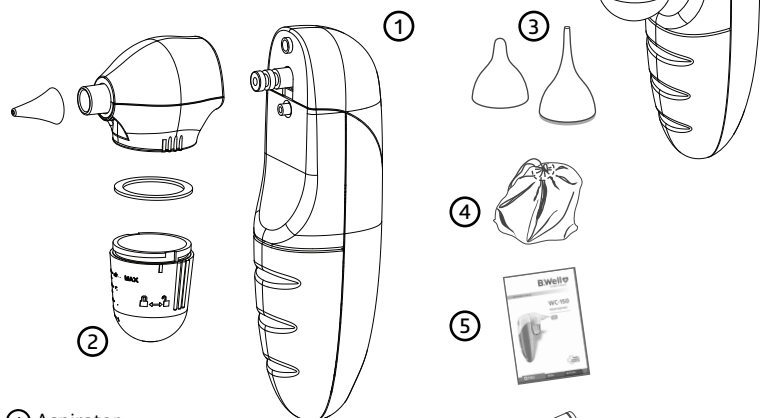

- 1 Aspirator
- 2 Zbiorniczek na wydzieliny
- 3 Końcówki silikonowe (2 szt.)
- 4 Torba do przechowywania i transportu
- 5 Instrukcja obsługi
- 6 2 baterie typu AA, 1,5 V

2. CECHA PRODUKTU

1. Duża siła:

Włóż końcówkę aspiratora do dziurki w nosie, a następnie możesz użyć tego urządzenia do usunięcia wydzieliny w sposób ciągły lub przerywany.

2. Bezpieczeństwo:

Mięka końcówka aspiratora zapewnia wygodną konstrukcję, aby zapobiec możliwości zranienia podczas korzystania z tego urządzenia.

3. Kompaktowa i łatwa konstrukcja:

Urządzenie jest kompaktowe, łatwe do trzymania i obsługi. Jest również bezpieczne i wygodne w użyciu dla niemowląt.

4. Bateria:

To urządzenie potrzebuje tylko dwóch baterii 1,5 V AA, wygodna wymiana baterii w dowolnym miejscu i czasie. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.

5. Muzyka:

Zamiast nijakiego i głośnego dźwięku podczas korzystania z urządzenia, nasze urządzenie jest wyposażone w unikalne rozwiązanie z pierścieniem i 12 dziecięcymi melodyjkami znanymi na całym świecie. Z pięknymi piosenkami, dziecko będzie czuć się bardziej komfortowo podczas zabiegu.

6. Głowica ssąca z możliwością umycia:

Końcówki, zbiorniczek na wydzieliny i część głowicy można zdjąć z urządzenia i umyć. Zbiorniczek na wydzieliny można również zdezynfekować za pomocą wrzącej wody.

3. PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest przeznaczone do odsysania przerywanego w celu usunięcia wydzieliny i śluzu z nosa u dzieci (w wieku 0-12 lat) w środowisku domowym.

4. PRZECIWWSKAZANIA

1. Nie wsuwaj końcówki głęboko w nozdrza dziecka. Używaj aspiratora do nosa w zalecany sposób. Trzymaj nozdrza w dół.
2. Dla bezpieczeństwa dziecka czas zasysania jest ograniczony do kilku sekund.
3. Nie używaj aspiratora do nosa w przypadku podrażnienia lub krwotoku z nosa.
4. W przypadku zakażenia, gorączki, podrażnienia nosa lub krwotoku należy skonsultować się z lekarzem.
5. Nie używaj aspiratora do nosa bez silikonowej końcówki lub z uszkodzonym zbiorniczkiem na wydzieliny.
6. Po każdym użyciu umyć silikonową końcówkę i zbiorniczek na wydzieliny.
7. Umyj ręce przed i po użyciu aspiratora nosa.

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy modyfikować tego urządzenia bez zgody producenta.
2. Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury, bardzo wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
3. Unikaj skrajnych obciążeń, wstrząsów lub przypadkowego spadnięcia.
4. NIE WOLNO myć korpusu urządzenia wodą ani żadnymi płynami. Zdecydowanie zalecamy wytarcie urządzenia miękką szmatką i utrzymanie urządzenia w czystości.
5. Wymień baterie, gdy moc i/lub dźwięk pompy słabną podczas korzystania z urządzenia.
6. Zaleca się wyjęcie baterii, jeśli urządzenie nie będzie używane przez pewien czas.
7. Przyłożenie ciśnienia przez urządzenie jest przerywane. Należy naciskać przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie w celu wytworzenia podciśnienia do usuwania wydzieliny i śluzu z nosa. Jeśli chcesz zatrzymać ssanie, wystarczy zwolnić przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
8. Aspirator do nosa służy wyłącznie do czyszczenia nosa i usuwania wydzieliny. Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie dalsze działania medyczne powinny być zgodne z zaleceniami lekarzy.
9. Podczas korzystania z urządzenia dziecko nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani połykać śliny, aby uniknąć podciśnienia powodującego zaburzenia równowagi błony bębenkowej.
10. Jeśli dziecko nie czuje się dobrze podczas korzystania z aspiratora do nosa, należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.
11. Nie stosować nadmiernej siły podczas umieszczania końcówki zasysającej w nosie.
12. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. W przypadku chorób nosa należy skonsultować się z lekarzem. Wyczyść końcówkę aspiratora przed każdym użyciem.
13. Aspirator do nosa nie jest zabawką. Przewidywani operatorzy tego urządzenia to rodzice lub dorośli, którzy mogą postępować zgodnie z instrukcjami i uwagami zawartymi w instrukcji obsługi tego urządzenia. Urządzenie nie może być używane przez same dzieci.
14. Nie używaj aspiratora do nosa, jeśli u pacjenta występują następujące przeciwwskazania:
 - Krwawienie z nosa lub otwarte rany wewnątrz
 - Ostry uraz głowy, twarzy lub szyi
 - Koagulopatia lub zaburzenia krzepnięcia
15. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować następujące zagrożenia i komplikacje:
 - Uraz mechaniczny
 - Podrażnienie/krwawienie z nosa
 - Krwawienie ze śluzówki
 - Dyskomfort i ból


UWAGA: Aspirator do nosa może być używany wyłącznie z końcówkami z serii B.Well WC. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu zakupu tych akcesoriów.

6. INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij pokrywę baterii, jak pokazano na rysunku.
2. Włóż dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V, dopasowując dodatnie (+) do dodatnich (+) i ujemne (-) do ujemnych (-).
3. Naciśnij baterie, aby upewnić się, że są całkowicie włożone.
4. Załóż pokrywę baterii, jak pokazano na rysunku.

UWAGA:

- Przy wymianie baterii należy stosować baterie tego samego typu, marki i pojemności
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie
- Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania
- Używaj baterii niezawierających metali ciężkich
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj baterii do zwykłych odpadów domowych

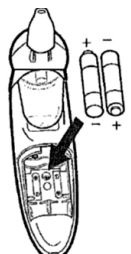


7. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

1. Wybierz odpowiednią końcówkę do użycia, w zależności od kształtu i wielkości nozdrzy dziecka.
 - Duża końcówka jest zalecana do stosowania, gdy śluz jest w bardziej stałej postaci
 - Wąska końcówka jest zalecana do stosowania, gdy śluz jest luźny i w postaci płynnej




2. Upewnij się, że końcówka jest pewnie umieszczona na aspiratorze. Przed użyciem upewnij się, że końcówka jest całkowicie nad zębarkiem.
3. Włóż końcówkę zasysającą do nozdrza.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby umożliwić odsysanie i usunięcie śluzu.

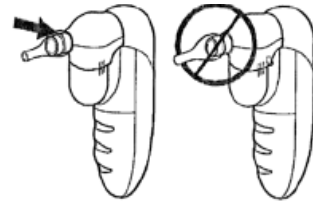

UWAGA: Śluz nie musi pojawić się natychmiast w zbiorniczku.

Po każdym użyciu zaleca się szybkie oczyszczenie końcówki poprzez wyjęcie końcówki z urządzenia.

5. Aby urządzenie działało sprawnie, podczas korzystania z urządzenia należy trzymać nozdrza skierowane w dół. Upewnij się, że końcówka aspiratora jest ustawiona pod kątem 90°. Nie kieruj go do nozdrzy. Pozwól, aby ssanie usunęło śluz. Powtórz w drugiej dziurce i w razie potrzeby. Zwolnij przycisk zasilania, aby zatrzymać ssanie.
6. Jeśli chcesz puścić piosenki, aby pocieszyć swoje dziecko, po prostu naciśnij przycisk uruchamiania muzyki.

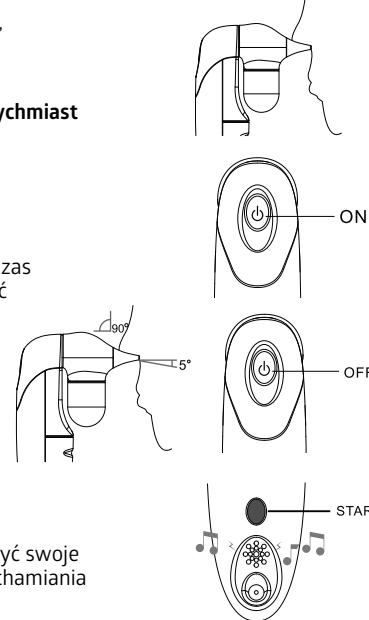

8. INSTRUKCJE CZYSZCZENIA

Po użyciu tego urządzenia wydzielina jest trzymana w zbiorniczku. Użytkownik musi tylko wyczyścić zbiorniczek, podkładkę i końcówkę zasysającą we wrzącej wodzie o temperaturze poniżej 150°C.

- Oddzielić końcówkę i moduł głowicy od podstawy aspiratora, delikatnie go odcinając.
- Odkręcić zbiorniczek na wydzielinę, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Czyszczenie korpusu urządzenia: wytrzyj urządzenie czystą, miękką, suchą szmatką.

UWAGA: Wymij moduł przyłączeniowy natychmiast po użyciu urządzenia. Nie należy ustawiać aspiratora poziomo, dopóki pojemnik zbiorczy nie zostanie odłączony. W przeciwnym razie płyn z modułu przyłączeniowego może dostać się do wnętrza urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA: NIE WOLNO myć korpusu urządzenia wodą ani żadnymi płynami. Nie czyścić urządzenia rozpuszczalnikami ani środkami ściernymi.

- Czyszczenie zbiorniczka na wydzielinę, modułu głowicy i końcówki zasysającej: mycie zbiorniczka na wydzielinę modułu głowicy i końcówki zasysającej łagodnym mydłem w wodzie przez 3 minuty. Następnie przepłukać te części bieżącą gorącą wodą z kranu przez 3 minuty i wysuszyć na powietrzu. Po zakończeniu procesu czyszczenia części te należy zdezynfekować wrzącą wodą.

9. SPECYFIKACJE

Efektywne podciśnienie	400 mm Hg (53,3 kPa)
Baterie	Dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V
Poziom ciśnienia akustycznego	75-80 dB
Waga	250 g
Wymiary	93,5×39,9×148 mm
Końcówka zasysająca	Miękki silikon
Silnik	3V/DC
Warunki pracy	Temperatura: +16°C ~ +35°C Wilgotność: do 85% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Temperatura: -25°C ~ +55°C Wilgotność: do 85% (bez kondensacji)

10. ZASTOSOWANE NORMY

Przesłana próbka powyższego sprzętu została przetestowana pod kątem oznaczenia CE zgodnie z Dyrektywą Europejską i następującymi normami:

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

11. GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, a także baterii, torebki do przechowywania, opakowania, akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem oraz części podlegających normalnemu zużyciu. W przypadku ujawnienia się wady produkcyjnej w okresie gwarancyjnym, wadliwe urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli naprawa jest niemożliwa, wymienione na inne. Producent może w razie potrzeby dokonać częściowej lub całkowitej wymiany urządzeń, bez uprzedniego powiadomienia.

Data produkcji jest zakodowana w numerze seryjnym urządzenia: pierwsze dwie cyfry to cyfry tygodnia, kolejne dwie cyfry to ostatnie cyfry roku.

12. INFORMACJE O SYMBOLU:

- Przed użyciem postępuj zgodnie z instrukcjami
- IP22** Stopień ochrony obudowy: IP22 (Chroniony przed penetracją ciał stałych o wymiarze większym niż 12,5 mm. Chroniony przed penetracją pionowo spadających kropli wody)
- Jako odpad przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
- CE** Znak CE
- SN** Numer seryjny
- 16°C - 35°C OPERATING CONDITION Warunki pracy, temperatura 16°C ~ 35°C
- 25°C - 55°C STORAGE CONDITION Warunki przechowywania, temperatura -25°C ~ 55°C
- Nazwa producenta

Ostatnia wersja 2022-W34

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Szwajcaria.
www.bwell-swiss.ch