

WS-1

Професійний стетоскоп з односторонньою головкою



UA Інструкція з експлуатації

⚠ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ВСТУП

Стетоскоп – популярний медичний прилад. Він є допоміжним інструментом для вимірювання артеріального тиску в лікувально-профілактичних установах і вдома.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Стетоскоп призначений для прослуховування різних тонів серця, легенів та інших органів тіла людини.

Стетоскоп використовується спільно з механічним тонометром для вимірювання систолічного і діастолічного артеріального тиску.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ

Стетоскоп WS-1 має діафрагму для аускультатії серцевих тонів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Прилад може використовуватися тільки в цілях, зазначених у цій інструкції. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані використанням пристрою не за призначенням.
- Не кидайте прилад і не піддавайте його сильним ударам.
- Використовуйте пристрій акуратно: сильні удари по голівці стетоскопа можуть пошкодити мембрану.
- Не допускайте пошкоджень ріжучими або гострими предметами.
- Не тисніть на мембрану рукою.
- Не піддавайте дії дуже високих або низьких температур, прямих сонячних променів.
- Якщо мембрана пошкоджена або Y-образна трубка постаріла, вчасно міняйте їх. В іншому випадку це може вплинути на результат аускультатії.
- Тримайте прилад подалі від дітей. Деякі частини досить малі, щоб їх можна було проковтнути.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Протипоказань не виявлено.

ПРИСТРІЙ ПРИЛАДУ

Стетоскоп WS-1 складається з бінауральної трубки, головки і Y-образної трубки.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- 1) Підготуйте стетоскоп. Приєднайте бінауральну трубку і головку стетоскопа до Y-подібній трубці.
- 2) Вставте вушні наконечники бінауральної трубки у вуха. Помістіть головку стетоскопа на потрібну ділянку тіла (для вимірювання артеріального тиску помістіть головку стетоскопа на руку під манжету туди, де проходить артерія). Потім почніть аускультатію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

Після використання стетоскоп рекомендується протерти тканиною, змоченою в 75% спиртовому розчині.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін складає 1 рік з дати придбання приладу. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням приладу, а також на упаковку. При виявленні виробничого дефекту протягом гарантійного терміну несправний прилад буде відремонтовано, а при неможливості ремонту – замінений безкоштовно.

Дата виготовлення вказана в номері LOT: номер тижня, потім останні дві цифри року.

ⓘ Виробник може вносити повні або часткові зміни в продукцію без попереднього повідомлення та відповідно до виробничих вимог.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина Y-образної трубки:	60 см
Вага:	73 г (без упаковки)
Умови використання: температура:	5°C ~ 40°C, вологість: 10% ~ 95%
Умови зберігання: температура:	-20°C ~ 70°C, вологість: 10% ~ 95%

РОЗШИФРОВКА СИМВОЛІВ



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ
ІНСТРУКЦІЮ



ВИРОБНИК



МОДЕЛЬ



НОМЕР ПАРТІЇ



СЕРТИФІКАЦІЯ CE



МОЖЕ БУТИ УТИЛІЗОВАНО РАЗОМ
З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ



ОПЕРАЦІЙНА
УМОВИ

ОБМЕЖЕННЯ ПО ТЕМПЕРАТУРІ
ЗАСТОСУВАННЯ, 5°C ~ 40°C



УМОВИ
ЗБЕРІГАННЯ

ОБМЕЖЕННЯ ПО ТЕМПЕРАТУРІ
ЗБЕРІГАННЯ, -20°C ~ 70°C

Дата останнього перегляду 2020-W48

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАШЕ ЗДОРОВ'Я ТРЕЙДІНГ»,
03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, буд. 19, кв. 102
Тел.: 044 221 68 20, 044 361 77 28, Електронна адреса: vzt.kiev@gmail.com

Виробник:

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Бі.Велл Свісс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Віднау, Швейцарія