

**1. ВВЕДЕНИЯ**

Шановний покупець, вітаємо Вас з придбанням компресорного небулайзера PRO-110 / PRO-115 компанії B.Well. Небулайзер компанії B.Well відрізняється високим ступенем надійності. Компресор подає потужний потік повітря в спеціальну камеру. Струмінь повітря розбиває лікарський препарат на надмалі частинки. У такому вигляді через маску або мундштук лікарський засіб надходить в дихальні шляхи пацієнта.

Компанія B.Well гарантує, що даний прилад виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає чинним національним та міжнародним стандартам безпеки.

Небулайзер з медичним приладом, тому використовувати його можна тільки відповідно до вказівок Вашого лікаря. Будь ласка, перед використанням приладу уважно вивчити інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь даних вказівок!

2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ваш інгалятор призначений для лікування астми, ХОЗЛ та інших респіраторних захворювань, де під час лікування потрібне застосування аерозольних ліків. Будь ласка, проконсультуйтесь з вашим лікарем і / або фармацевтом, щоб визначити, чи дозволено застосування ваших ліків для даного інгалятора. При виборі типу, дози і режиму лікування дотримуйтесь інструкції вашого лікаря або медичного практика.

Механізм дії небулайзера заснований на дисперсному розпиленні лікарського засобу. Створюючи консистенцію аерозолю, препарат швидше досугає всіх виділів дихальної системи і надає терапевтичний ефект.

Аеродинамічний розмір часток менше 5 мкрон дозволяє проводити ефективні інгаляції нижніх дихальних шляхів.

3. ПРОТИПОКАЗАННЯ И ОБМЕЖЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

В якості препаратів для небулайзера категорично заборонено застосовувати:

- речовини та розчини, що містять зважені частки (відвари, супензії, настої і т.д.). Зважені частинки значно більші, ніж частки респіраторної фракції. Використання їх в небулайзера може завадити швидкість здоров'ю;
- розчини що містять масло (в тому числі ефірна масла). Частинки масел, потрапляючи в нижні дихальні шляхи, утворюють дрібні півники і підвищують ризик розвитку так званих «масляніх пневмоній»;
- вогненебезпечні анестезуючі суміші, легко зайністіти при контакті з повітрям, киснем і закисом азоту;
- ароматичні речовини.

Використовуйте прилад згідно з тим, як описано в даний інструкції та строго за рекомендаціями Вашого лікаря.

1. МЕДИЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Даний посібник і вірф є заміною консультацій, наданих лікарем або іншим медичним практиком. Інформацію, що міститься в цьому документі, або даний вірф не можна використовувати для самостійної діагностики чи лікування або при виборі ліків. Якщо у вас є або відібраєте, що є, медичні проблеми, негайно зверніться до лікаря.

4. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання, уважно вивчити інструкцію. Зберігайте її протягом усього терміну служби приладу.

Даний прилад призначений тільки для інгаляційної терапії. Використовуйте прилад згідно даної інструкції і приписам Вашого лікаря. Будь-яке інше застосування вважається неправильним, а, отже, небезпечною.

Прилад не підходить для використання з вогненебезпечними анестезуючими сумішами, легко зайністіти при контакті з повітрям, киснем і закисом азоту.

Прилад не підходить для анестезії та легеневої вентиляції.

Виробник не несе відповідальністі за пошкодження, що виникли внаслідок неправильного застосування приладу, а також внаслідок підключення приладу до електрических установок, що не відповідають стандартам безпеки.

Правила використання небулайзера

У компресорному небулайзери B.Well PRO-110 і PRO-115 може застосовуватися весь перелік лікарських препаратів, рекомендованих для небулайзерної терапії.

Тип лікарського засобу, дозу і режим введення може призначити тільки лікар.

Використовуйте тільки насадок з комплекту небулайзера, які рекомендовані Вашим лікарем. Використовуйте насадку для інгаляції через ніс тільки в разі, якщо вона рекомендована до використання Вашим лікарем. Ніколи не вводьте насадку в ніс, тиматії та якожма вближе до носа.

Перш ніж використовуєте лікарський засіб, перевірте, чи є у нього протипоказання до застосування в небулайзера.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уважно стежте за терміном придатності дозволених до використання розчинів. Не використовуйте розчини з вичерпаним терміном придатності.
- Шоб уникнути поширення інфекції, не рекомендується використання одних і тих же комплектуючих різними пацієнтами
- Очищення і дезінфекція комплектуючих необхідно проводити кожен раз після використання приладу, а також, якщо ви використовуєте описаний перший раз і / або після тривалого зберігання. Переконайтесь, що деталі належним чином продезінфіковані і висушені, після чого зберігайте їх в чистому місці.
- Комплектуючі і прилад необхідно очистити згідно з описом в п.9. Очищення, догляд і зберігання даної інструкції
- Завжди очищайте небулайзер і його складові частини від залишків лікарських речовин і миючих засобів. Ніколи не залишайте очищувальний розчин в розпиловачі, мундштуків або повітряні трубці!
- Небулайзер та його компоненти не можна сушити в мікрохвильовій печі, феном або за допомогою інших пошкоджувачів.
- Під час використання небулайзера не закріпуйте повітровізаборники приладу. При використанні не накріпайте небулайзер квадрою рушника, тощо. Не ставте прилад в місці, де існує загроза припинення доступу повітря до цих отворів.
- Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. Прилад містить дрібні деталі, які можуть бути проковтнуті дитиною. Дитина може запутатися в шнурі / повітряному шлангу та задихнутися. Діти і люди з обмеженими можливостями можуть користуватися приладом тільки під наглядом дорослого.
- Не піддавайте прилад впливу шкідливих парів або леточів речовин.
- Не наливайте в розпиловачі більше 8 мл лікарського розчину.
- Під час використання нахилийте розпиловач більш ніж на 45 градусів, не трусить його.
- Не перегиняйте повітряний шланг як під час зберігання, так і під час використання небулайзера.
- Не кидайте прилад і не піддавайте його пошкодженням.
- Не блокуйте кришку повітряного фільтра.
- Прилад сквалени тільки для використання людиною. Використовуйте його тільки за призначеннем.

Небезпека ураження електричним струмом

- Використовуйте тільки оригінальні комплектуючі та аксесуари.
- Прилад не захищений від проникнення рідини, не смочуйте його.
- Не можна торкатися до приладу мокрими або вологими руками.
- Не піддавайте прилад впливу природних факторів.
- Перед очищанням приладу його необхідно вимкнути і від'єднати від електромережі.
- Відключіть прилад від мережі необхідно відразу після припинення сеансу терапії.
- Не від'єднуйте розпиловач при розчистці приладу.
- Ставте прилад на рівну, стійку поверхню під час використання.
- Не занурюйте прилад в воду.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсель. Заміна мережевого шнура повинна здійснюватися тільки в авторизованому сервісному центрі.
- Не допускайте контакту межевого шнура з гарячими поверхнями.
- Не тягніть за шнур або за прилад, щоб відключити його від електромережі.
- Ремонт дінного приладу повинен здійснюватися тільки в сервісних центрах, які були рекомендовані B.Well.

На правильне функціонування приладу можуть впливати електромагнітні завади, що перевищують допустимі межі, зазначені в Європейських стандартах.

Якщо на даний прилад діє інший електроприлад, перемістіть його в інше місце і підключіть до іншої розетки. У разі несправності прочитайте розділ «11. Таблиця можливих несправностей».

Не відкривайте корпус приладу.

Перш ніж підключите прилад до електромережі, перевірните, що робоча напруга електромережі співпадає з напругою приладу. Величина робочої напруги мерець вказана на дні небулайзера. У разі коли зазначена на дні небулайзера робоча напруга не збігається з напругою електромережі, зверніться до фахівця для вирішення проблем.

Цілому, не рекомендується використання подовжувачів та трийників. Якщо Ви вирішили більше не користуватися приладом, необхідно утилізувати його згідно з діючими правилами. Встановіть прилад таким чином, щоб легко було зробити відключення.

5. ЗОБРАЖЕННЯ ПРИЛАДУ И ЙОГО ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

1 Корпус приладу

2 Розпиловач Basic

3 Ніздро для повітряного шланга

4 Кришка фільтра

5 Тримач розпиловача

6 Вентиляційний отвір

7. Інгалятор медичний

8. Маска дитяча

9. Набір фільтрів

10. Сумка для зберігання

11. Інструкція з експлуатації

12. Гарантійний талон

13. Налітки

14. Мундштук

15. Насадка для інгаляції через ніс

16. Маска для дорослого

17. Розпиловач Basic

18. Мундштук

19. Сумка

20. Інструкція з експлуатації

21. Гарантійний талон

22. Гарантійний талон

23. Гарантійний талон

24. Гарантійний талон

25. Гарантійний талон

26. Гарантійний талон

27. Гарантійний талон

28. Гарантійний талон

29. Гарантійний талон

30. Гарантійний талон

31. Гарантійний талон

32. Гарантійний талон

33. Гарантійний талон

34. Гарантійний талон

35. Гарантійний талон

36. Гарантійний талон

37. Гарантійний талон

38. Гарантійний талон

39. Гарантійний талон

40. Гарантійний талон

41. Гарантійний талон

42. Гарантійний талон

43. Гарантійний талон

44. Гарантійний талон

45. Гарантійний талон

46. Гарантійний талон

47. Гарантійний талон

48. Гарантійний талон

49. Гарантійний талон

50. Гарантійний талон

51. Гарантійний талон

52. Гарантійний талон

53. Гарантійний талон

54. Гарантійний талон